

## OPERASIONAL DAN MANUAL OPTIMUS 3M

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPEKIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	OPTIMUS 3M	Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan 3 Crank (adjustable hi-lo, back raise dan foot raise)	Pengoperasian secara Manual dengan cara diputar kekiri untuk turun dan putar ke kanan untuk naik	Penggunaan crank yang tidak benar akan menyebabkan crank menjadi cepat rusak
		Crank ke-1 berfungsi untuk mengatur ketinggian tempat tidur dari permukaan lantai (naik dan turun)		Penempatan kembali crank ketempatnya setelah pemakaian akan menghindarkan potensi kecelakaan dan kerusakan karena benturan
		Crank ke-2 berfungsi untuk mengatur datar dan tegak posisi punggung dan kepala (sudut datar dan tegak)		
		Crank ke-3 berfungsi untuk mengatur datar dan sudut kemiringan posisi lutut dan kaki (sudut datar dan tekuk)		
		Lebar Bottom 100 mm lebih lebar dari standar bed	Memberikan kenyamanan dan keleluasaan pada pasien untuk berubah posisi tidur karena bed lebih lebar dari standar	Pemberian beban yang berlebih/ penggunaan lebih dari satu orang akan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan
		Aksesoris berupa head board dan foot board diatas bagian kepala dan dibawah bagian kaki ranjang berfungsi untuk menjaga posisi pasien tetap di tengah dan berfungsi juga sebagai pegangan pada saat akan memindahkan/ menggeser tempat tidur	Pengoperasian secara manual dengan menggunakan lock pin sebagai pengunci	Benturan dan pengoperasian yang salah akan menyebabkan kondisi H/F board cepat rusak
		Penggunaan four lock caster (dua di depan dan dua dibelakang) berfungsi untuk memberikan kestabilan dan keamanan pada saat posisi ranjang dalam kondisi terparkir	Pengoperasian secara manual dengan cara menekan handle pada caster dengan menggunakan kaki	Pengoperasian yang salah dan dengan cara paksa akan menyebabkan fungsi handle serta Lock pada caster akan cepat rusak (patah)



Type **Optimus - 3M**

### FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel  
dismantle

Head/foot board panel  
installation

## Sistem Pengoperasian Crank

Cara membuka crank



Cara mengoperasikan Crank




## CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.



## Dimensi

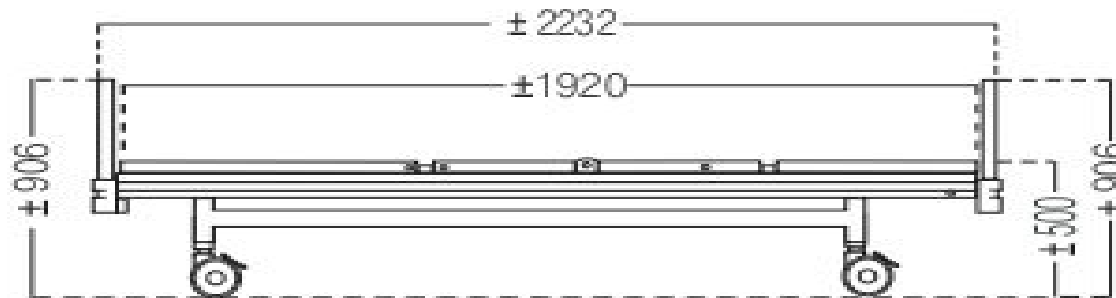

- Frame material : Steel
- Frame finishing : Powder coating
- Frame color : White Grey