



OPERASIONAL DAN MANUAL CB 002

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPEKIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	CB 002	Sistem pengaturan ketinggian bed menggunakan lock pin dan standar level ketinggian diatur dalam 3 tingkat ketinggian (knock down).	Pengoperasian secara manual dengan menaikkan dan menurunkan bed sesuai posisi lock pin	Tidak ada
		Cara penyesuaian ketinggian dilakukan dengan manual (knock down) dengan bantuan tenaga manusia.	Penyesuaian ketinggian dilakukan dengan secara manual dengan tenaga manusia saat kondisi bed kosong (tanpa beban)	
		Sistem pengaturan level ketinggian dengan menggunakan lock pin yang dirancang khusus yang berfungsi sebagai stopper (kaitan), untuk menahan beban saat bed digunakan	Lock dirancang untuk menahan beban pasien sesuai standar yang ditetapkan	
		Pengaturan posisi ketinggian sandaran punggung dan kepala menggunakan gear 4 tingkat penyesuaian untuk back raise, mulai dari posisi 0° sampai posisi maksimal	Pengoperasian secara manual dengan menaikkan sampai mengunci pada posisi tertentu dan pada saat akan mengembalikan pada posisi 0° back ditekan sampai ketinggian maksimal kemudian release sampai posisi 0°	Beban yang berlebih akan membuat gear rusak sehingga reclining tidak berfungsi normal atau sama sekali tidak berfungsi

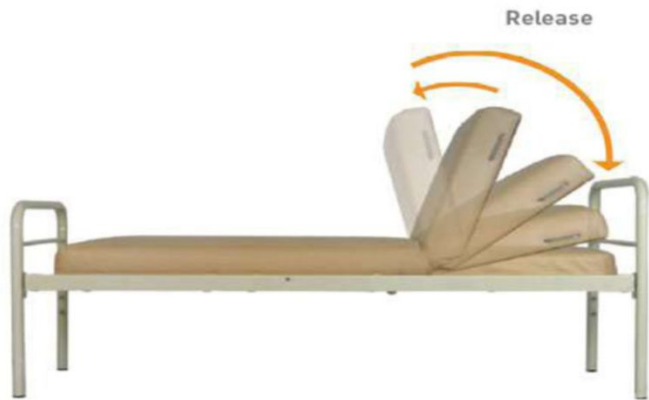

CB-002

PRODUCT DIMENSION

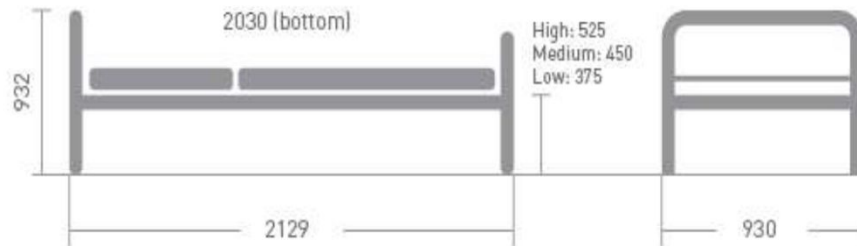

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Four adjustable back raise by gear, three adjustable Hi-Lo (knock down)

Accessories Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003)

Mattress Material Urethane & Vinyl cover

Weight (kg) Approx. 60 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Dimension W x D x H (mm)** 930 x 2129 x 932