

OPERASIONAL DAN MANUAL CB-003 STRECHER

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPEKIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	CB 003 (stretcher)	Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan 2 Crank (adjustable hi-lo, back)	Pengoperasian secara Manual dengan cara diputar kekiri untuk turun dan putar ke kanan untuk naik	Pemakaian terus menerus dan tidak benar dapat merusak crank
		Crank ke-1 berfungsi untuk mengatur ketinggian tempat tidur dari permukaan lantai (naik dan turun)		Setelah digunakan posisi crank harus dikembalikan ke tempat semula untuk menghindari benturan atau tertabrak
		Crank ke-2 berfungsi untuk mengatur datar dan tegak posisi punggung dan kepala (sudut datar dan tegak)		
		Sistem penguncian roda caster dengan total lock system (pedal pengunci untuk ke-4 roda)	Proses penguncian dan pelepasan kuncinya dilakukan dengan cara ditekan atau diinjak oleh kaki di bagian <i>pedal</i> untuk penguncian, sedangkan pelepasan atau <i>release</i> pedalnya diangkat menggunakan ujung kaki	Pengopesaian pedal yang tidak benar akan menyebabkan fungsi lock tidak maksimal (Ranjang masih bisa bergerak)
		Keranjang dibawah tempat tidur berfungsi untuk penyimpanan sementara peralatan untuk pasien atau Rumah Sakit	Digunakan untuk benda dimensi besar (bahan wiremess)	Untuk benda dimensi kecil perlu alas tambahan
		Aksesories yang bisa ditambahkan berupaTiang infus (irigator bar) dan side rail yang berfungsi untuk gantungan botol infus, tempat untuk tabung gas O2 dan pagar pembatas tempat tidur	Tiang infus dioperasikan secara manual dan posisi bisa dikiri atau kanan yang ketinggiannya bisa diatur secara manual	Benturan dan beban yang berat dapat menyebabkan kerusakan tiang infus)
	Side terdiri dari 2 set (kanan dan kiri) yang pengoperasiannya secara manual dengan lock pin	Penggunaan yang tidak baik dan Beban yang tertalu berat dapat menyebabkan kerusakan fungsi side rail		



Crank Operational System



Multi purpose Tray



Removable Side Rail



Vinyl-covered Mattress

CB-003 STRETCHER

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Adjustable Hi-Lo back raise by crank

Accessories Folding Side Rail, Vinyl covered Mattress (50 mm in thickness), Cylinder Oxygen Case (Max. 500L), Irrigator Bar, Multi Purpose Tray

Lock System Double Lock System

Weight (kg) Approx. 70

Dimension W x D x H (mm) 750 x 1900 x 551.5 (Min.)

PRODUCT DIMENSION

