

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

1. Pemasangan Sticker Safety Notice dan Safety Label Head Board

SAFETY NOTICE

SAFETY NOTICE
 PEMBERITAHUAN KESELAMATAN


- Jangan menggunakan tempat tidur ketika dalam kondisi rusak.
Do not use the bed if improper condition is found.
- Pada saat memutar pegangan engkol, harap perhatikan bagian tangan, kaki atau anggota tubuh dari pasien tidak berada dibawah tempat tidur dan di tengah-tengah rel samping.
When turning the crank handle please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the rails.
- Ketika memutar pegangan engkol ke atas dan ke bawah, hanya memperbolehkan satu pasien berada di atas tempat tidur.
When turning the crank handle up or down, only one person allow to be on the bed.
- Ketika pasien tertidur, rel samping harus dalam keadaan terpasang berdiri untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur.
When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- Setelah memutar pegangan engkol, pegangan engkol harus ditempatkan pada posisi semula (terkunci) dan melipat kedalam.
After turning up and down the crank handle must be put back on first position (locked) and fold inside.
- Pegangan engkol harus selalu pada posisi terkunci dan melipat kedalam untuk menghindari benturan dengan kaki.
Crank handle must be always on locked position and folded inside to avoid bump other ribs.

PT. Chitose Internasional Tbk.
 Telp. (022) 6031900 . Fax. (022) 6031895

DILARANG MELEPAS LABEL INI

Posisi Pemasangan :
DI Head Board, Rata tengah dan 10 mm dari bagian atas Wood Pattern Head Board
Pasang safety Notice terlebih dahulu, kemudian safety Label (jarak 10mm)

Pastikan :
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker merekat dengan sempurna

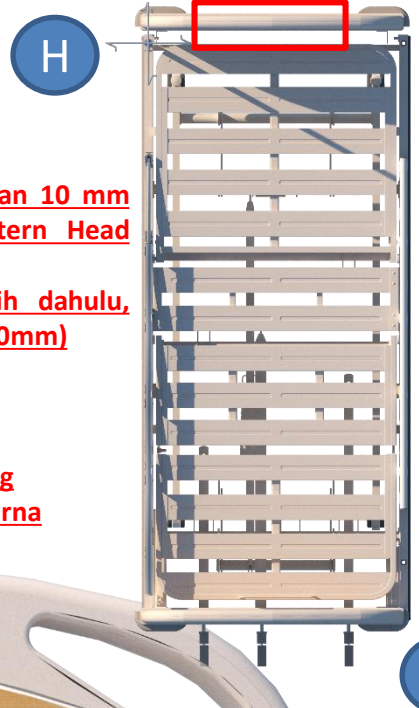


CB-XXXX D DX

SAFETY LABEL



CB-XXXX D ST

CB-XXXX D JP

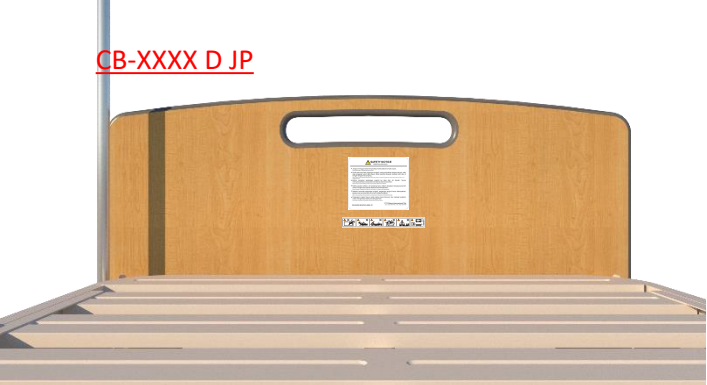

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

1. Pemasangan Sticker Safety Notice dan Safety Label pada Foot Board

SAFETY NOTICE

SAFETY NOTICE
PEMBERITAHUAN KESELAMATAN


- Jangan menggunakan tempat tidur ketika dalam kondisi rusak.
Do not use the bed if improper condition is found.
- Pada saat memutar pegangan engkol, harap perhatikan bagian tangan, kaki atau anggota tubuh dari pasien tidak berada dibawah tempat tidur dan di tengah-tengah rel samping.
When turning the crank handle please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the side rail.
- Ketika memutar pegangan engkol ke atas dan ke bawah, hanya memperbolehkan satu pasien berada di atas tempat tidur.
When turning the crank handle up or down, only one person allow to be on the bed.
- Ketika pasien tertidur, rel samping harus dalam keadaan terpasang berdiri untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur.
When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- Setelah memutar pegangan engkol, pegangan engkol harus ditempatkan pada posisi semula (terkunci) dan melipat kedalam
After turning up and down the crank handle must be put back on first position (locked) and fold inside.
- Pegangan engkol harus selalu pada posisi terkunci dan melipat kedalam untuk menghindari benturan dengan kaki.
Crank handle must be always on locked position and folded inside to avoid bump on other's.

PT. Chitose Internasional Tbk.
Telp. (022) 6031900 - Fax. (022) 6031855

DILARANG MELEPAS LABEL INI

Posisi Pemasangan :
DI Foot Board, Rata tengah dan 10 mm dari bagian bawah Wood Pattern Foot Board
Pasang safety label terlebih dahulu, kemudian safety notice

Pastikan :
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker merekat dengan sempurna

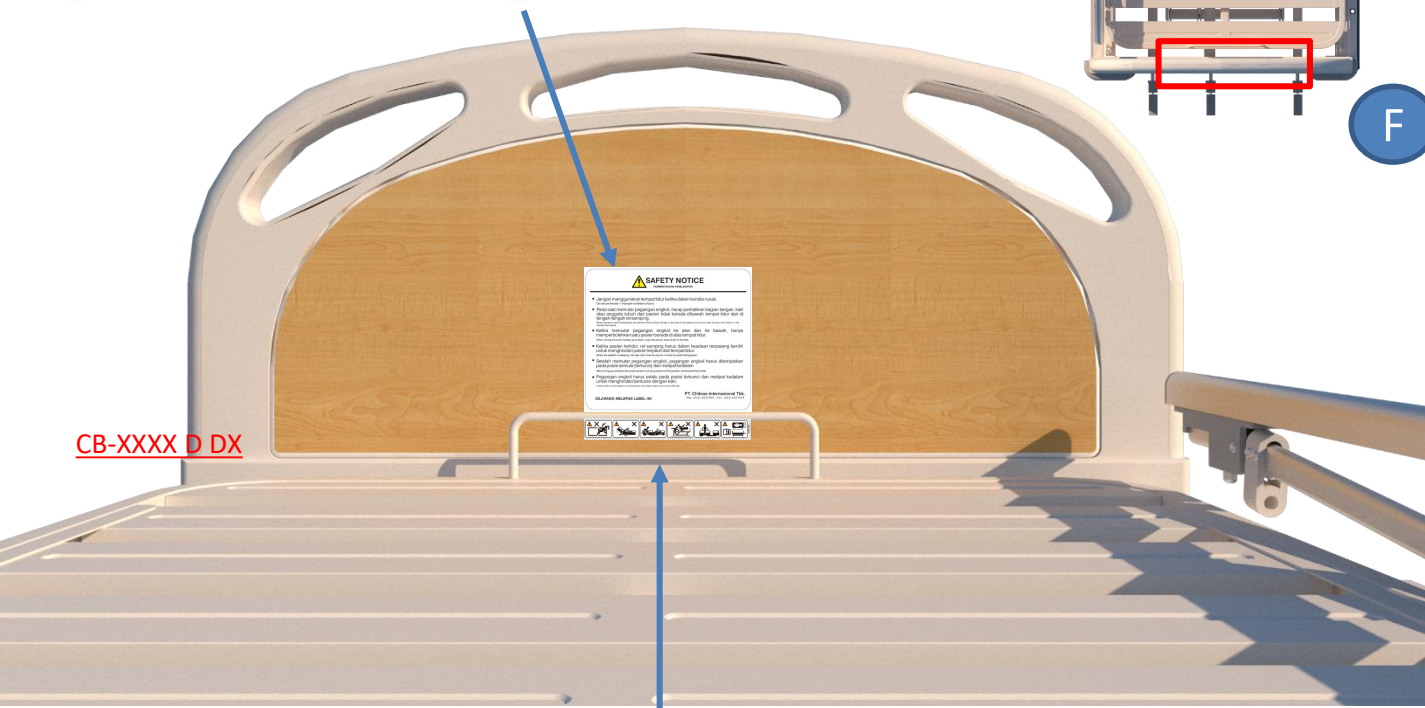


CB-XXXX D DX

SAFETY LABEL



CB-XXXX D ST

CB-XXXX D JP

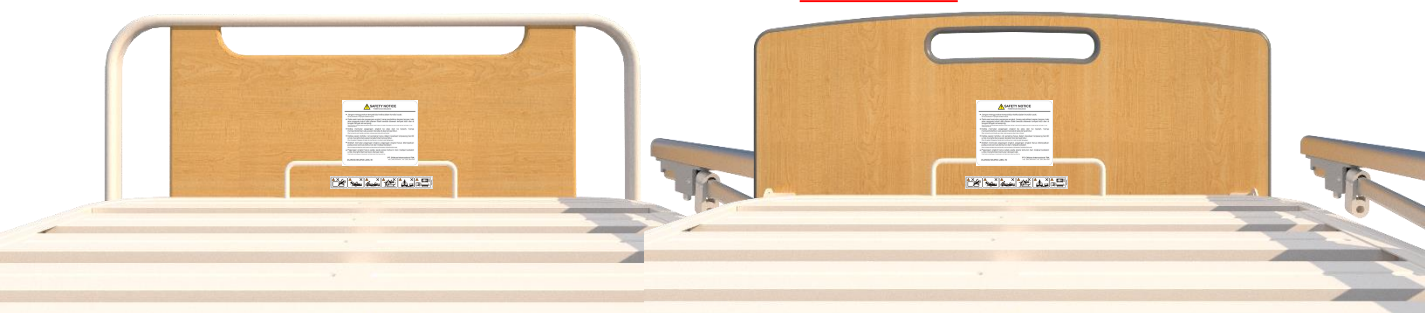

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	⚠		
	⚠		
	⚠		

2. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, Caution dan SNI


CAUTION LABEL



LABEL SNI




LOGO

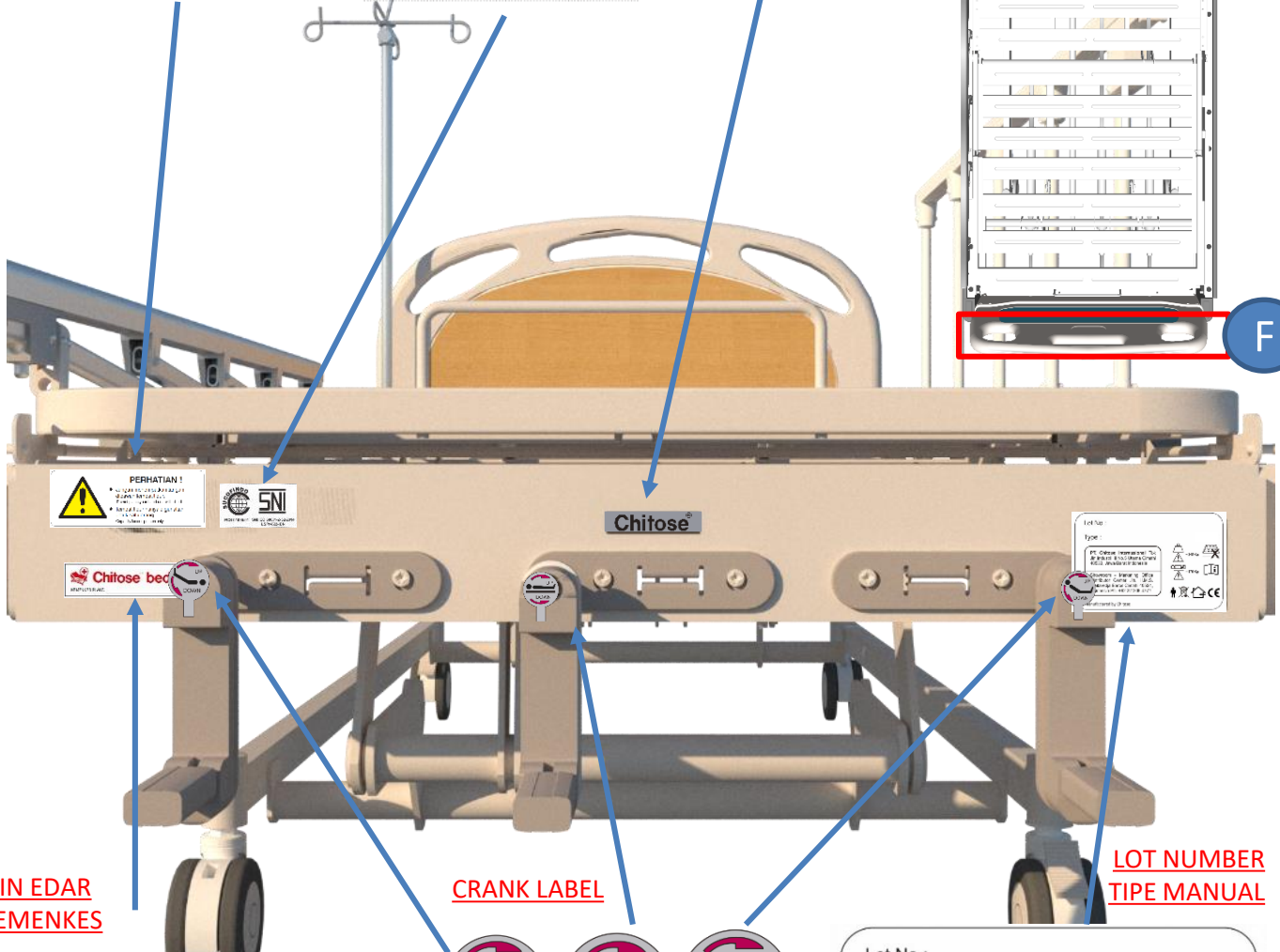


IZIN EDAR KEMENKES



CRANK LABEL

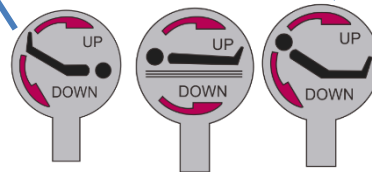

LOT NUMBER TIPE MANUAL

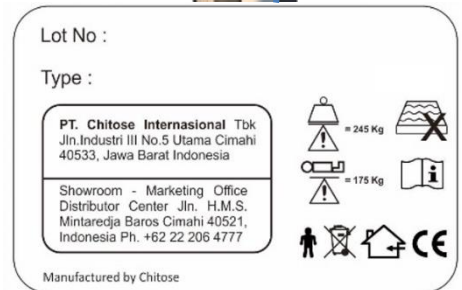

**Posisi Pemasangan ;
 Main Frame di area Foot Board**

**Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker merekat dengan sempurna
 Label SNI memakai ukuran besar**

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

2. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, Caution dan SNI


CAUTION LABEL



LABEL SNI




LOGO

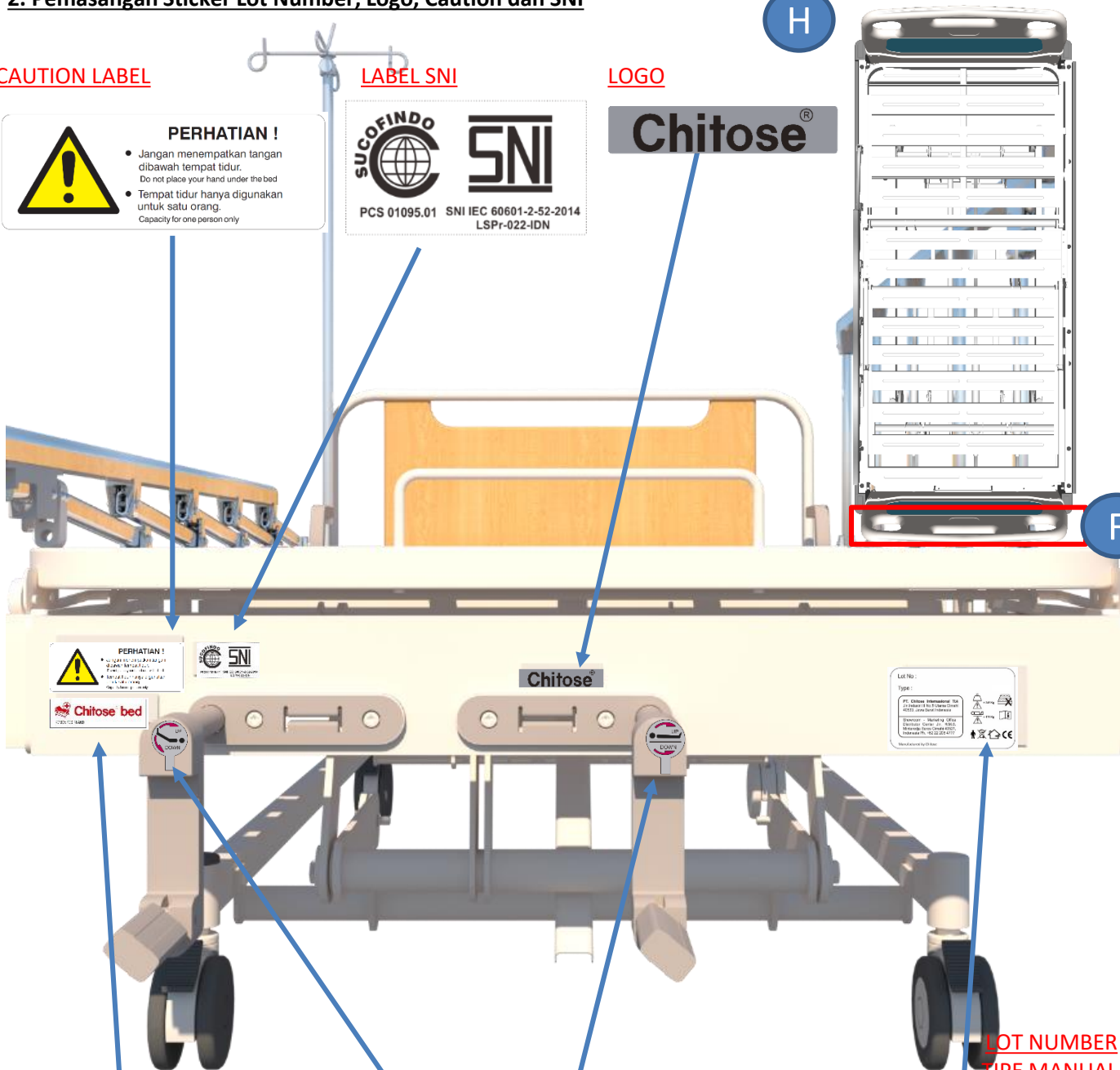


**IZIN EDAR
 KEMENKES**



CRANK LABEL

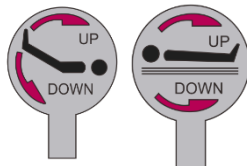

**LOT NUMBER
 TYPE MANUAL**

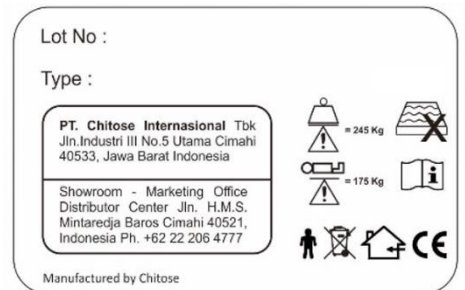

**Posisi Pemasangan ;
 Main Frame di area Foot Board**

**Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker merekat dengan sempurna
 Label SNI memakai ukuran besar**


Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

2. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, Caution dan SNI

CAUTION LABEL

LABEL SNI

LOGO

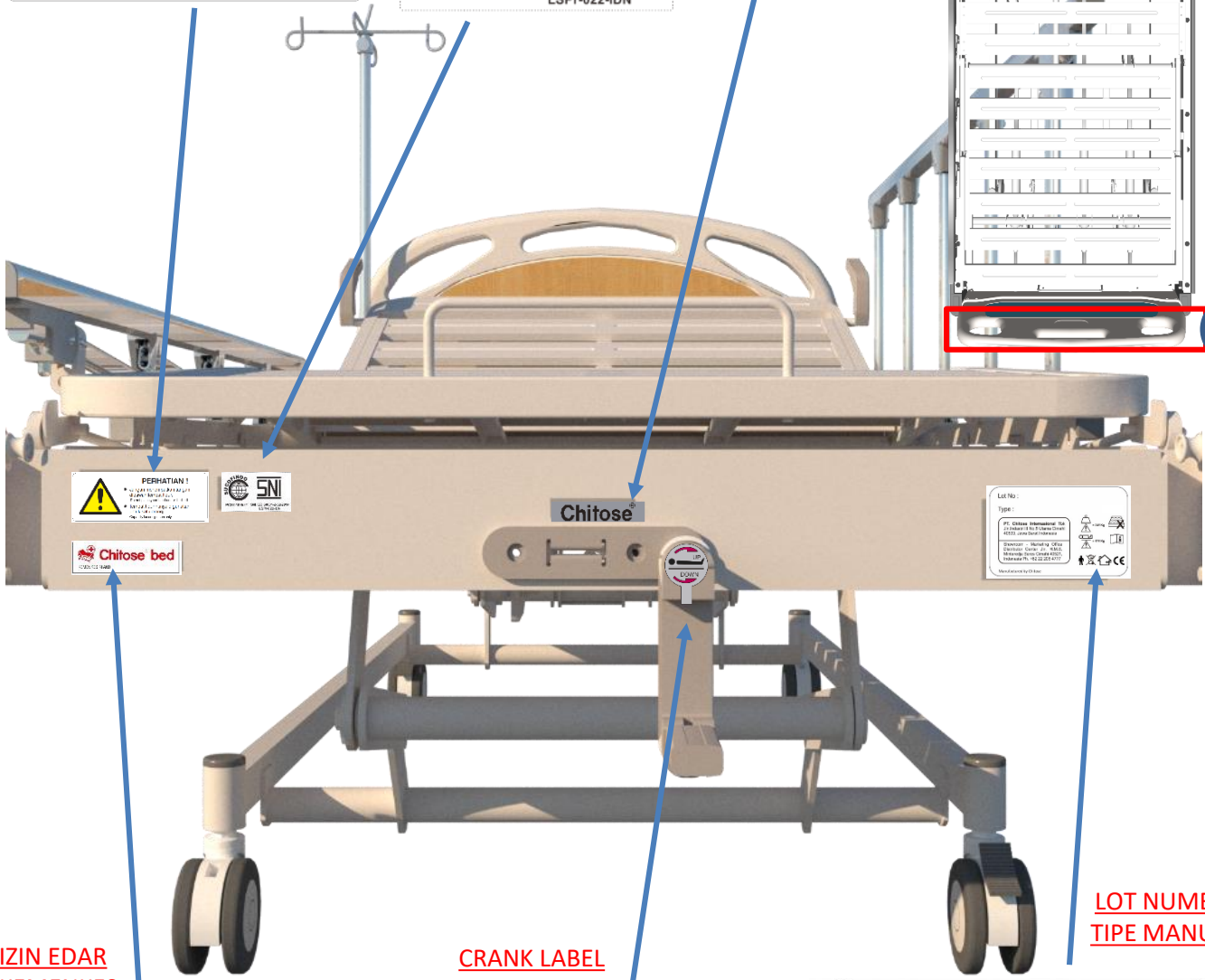

**IZIN EDAR
 KEMENKES**

CRANK LABEL



**LOT NUMBER
 TIPE MANUAL**

**Posisi Pemasangan ;
 Main Frame di area Foot Board**

**Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker merekat dengan sempurna
 Label SNI memakai ukuran besar**

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

2. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, Caution dan SNI

CAUTION LABEL

VOLTAGE LABEL

LABEL SNI



PERHATIAN !

- Jangan menempatkan tangan dibawah tempat tidur.
Do not place your hand under the bed
- Tempat tidur hanya digunakan untuk satu orang.
Capacity for one person only





SNI

PCS 01095.01 SNI IEC 60601-2-52:2014
LSPr-022-IDN

LOGO

Chitose[®]

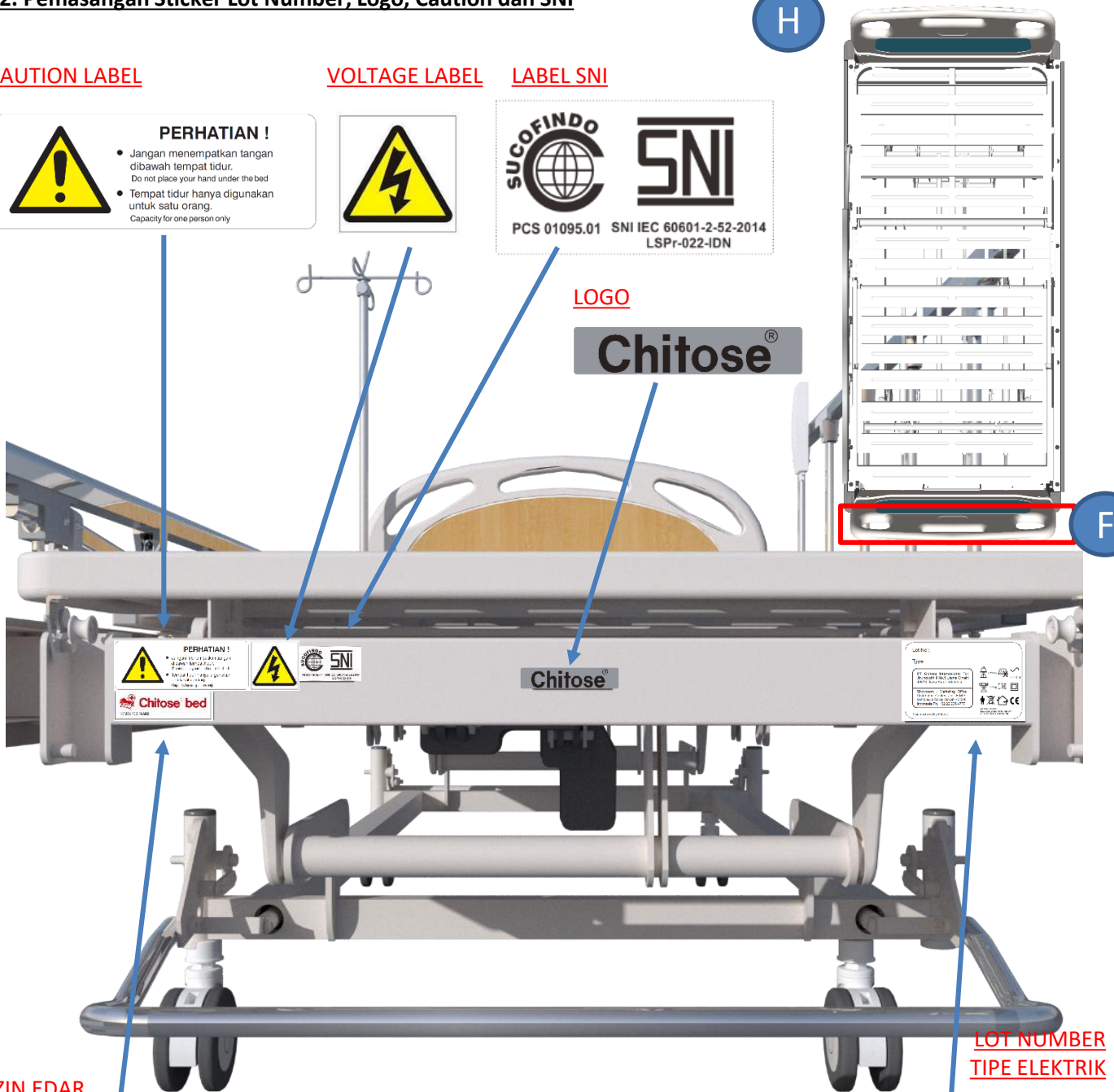

**IZIN EDAR
 KEMENKES**

**LOT NUMBER
 TIPE ELEKTRIK**



Chitose bed[®]

KEMENKES RI AKD: _____

**Posisi Pemasangan ;
 Main Frame di area Foot Board**


**Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker melekat dengan sempurna
 Label SNI memakai ukuran besar**

Lot No : _____


Type : _____

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia


Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mintaredja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Ph. +62 22 206 4777




~ 250 Kg





IP X 4








~ 185 Kg











AC 230V~50/60Hz
 Duty cycle 2 min ON/18 min OFF
 Int. ~ 10%, Max 2 min/ 10 min.

Manufactured by Chitose



Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

**3. Pemasangan Sticker Lot Number, Logo, dan Caution pada
 Folding Side Rail**

CAUTION LABEL



PERHATIAN !
 Jangan menempatkan tangan anda di area ini ketika sedang mengoperasikan rel samping.
 Do not place your hand in area shown in picture when operate the Side Rail

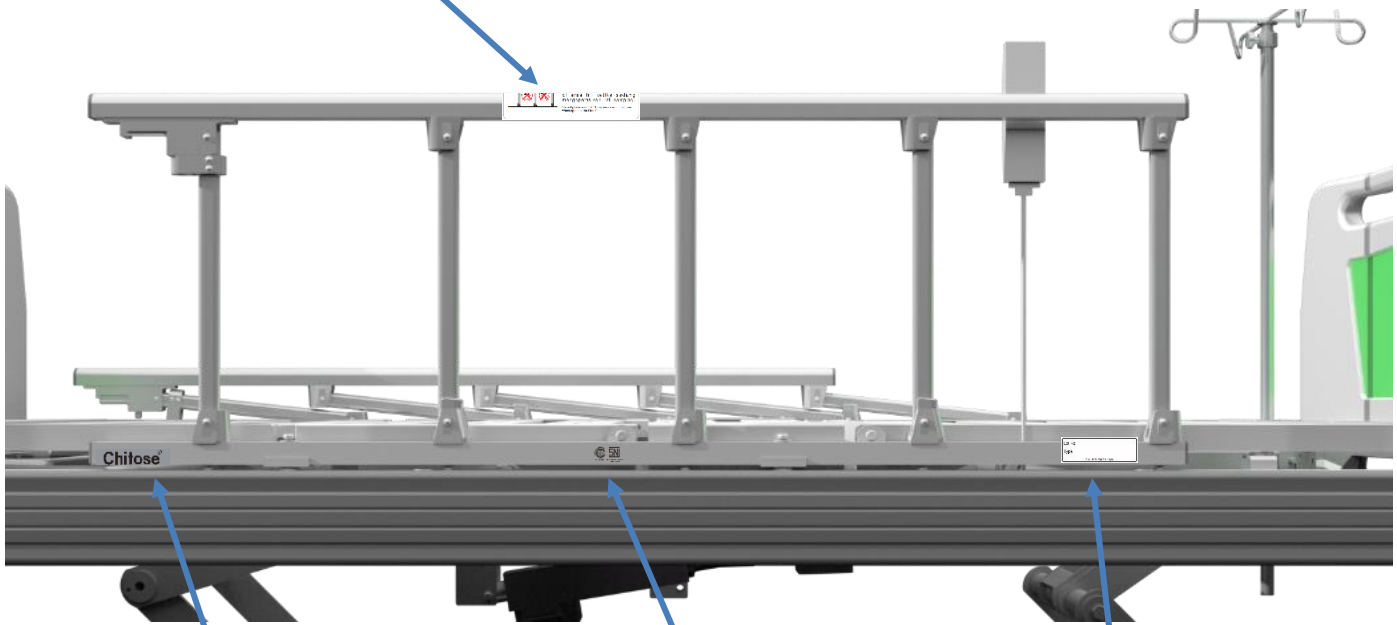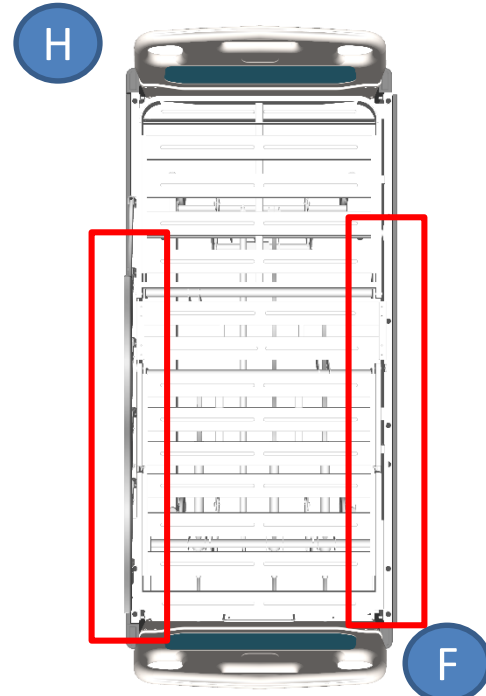

LOGO

LABEL SNI

**LOT NUMBER
 AKSESORIS**



Lot No : _____

Type : _____

Manufactured by Chitose


**Posisi Pemasangan ;
 Folding Side Rail**

**Pastikan :
 Pemasangan Rata / tidak miring
 Sticker melekat dengan sempurna
 Label SNI memakai ukuran kecil**

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

4. Pemasangan Sticker Logo pada H/F BOARD

H/F Board DX

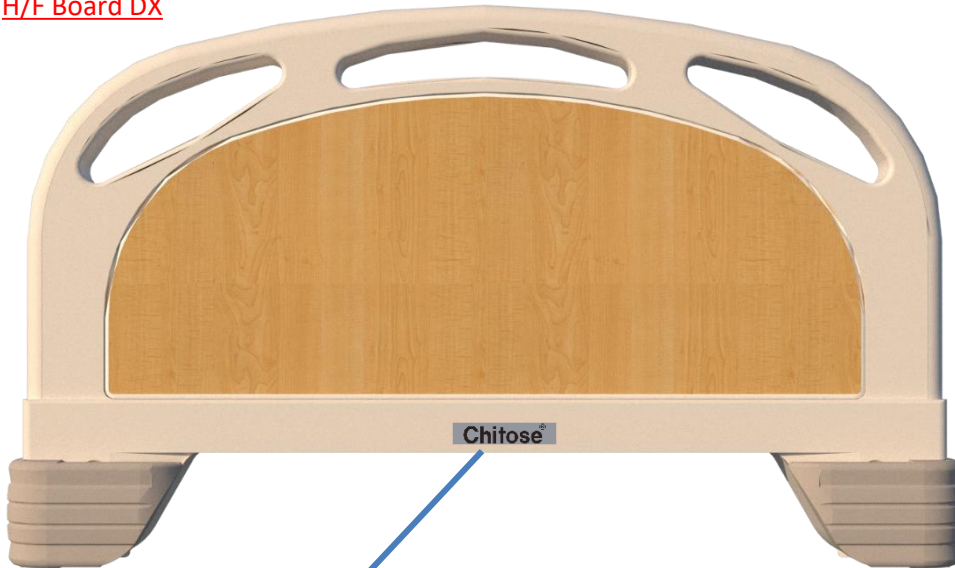

LOGO



H/F Board JP




H/F Board ST



Posisi Pemasangan :
Head/Foot Board (menghadap ke luar)

Pastikan :
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker merekat dengan sempurna

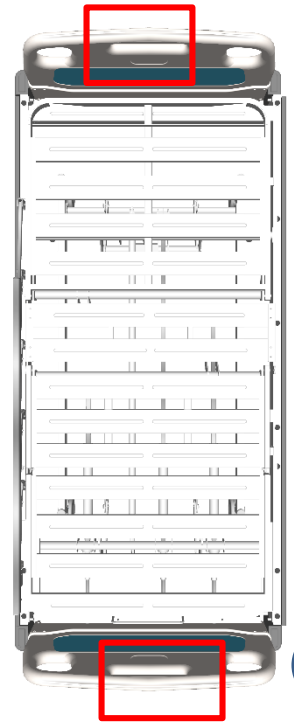

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
.	△		
.	△		
.	△		

5. Pemasangan Sticker Lot Number dan label SNI pada IV Pole / Irrigator Bar



LABEL SNI



LOT NUMBER AKSESORIS

Lot No :
 Type :
 Manufactured by Chitose

Posisi Pemasangan :
IV Pole / Irrigator Bar

Pastikan :
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker melekat dengan sempurna
Label SNI memakai ukuran kecil

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
.	△		
.	△		

6. Pemasangan Sticker Lot Number pada Cabinet

**LOT NUMBER
AKSESORIS**

Lot No :

Type :

Manufactured by Chitose

LOGO



**Posisi Pemasangan ;
Cabinet**

**Pastikan :
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker merekat dengan sempurna**

Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl.Efektif
	△		
	△		
	△		

7. Pemasangan Sticker Lot Number pada Over Bed Table

LOT NUMBER
AKSESORIS

Lot No :
Type :
Manufactured by Chitose



Posisi Pemasangan :
Over Bed Table

Pastikan :
Pemasangan Sticker Lot Number arah Vertikal
Pemasangan Rata / tidak miring
Sticker merekat dengan sempurna