

MATERI PELATIHAN KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA CB 002

D

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO	PENGUNAAN	SPESIFIKASI KEMASAN
1	CB 005 D	Sistem pengaturan ketinggian bed menggunakan lock pin dan standar level ketinggian diatur dalam 3 tingkat ketinggian (knock down),	Pengoperasian secara manual dengan menaikkan dan menurunkan bed sesuai posisi lock pin	Perlu kehati-hatian dan personil yang cukup (min 3 orang) saat setting ranjang	Diperuntukkan untuk tempat tidur pasien Rumah Sakit Kelas 3	CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
		Sistem penguncian roda caster untuk keamanan pada saat posisi bed parkir menggunakan sistem penguncian ganda (double lock caster), saat posisi bed didorong (jalan) posisi lock caster harus lepas (release)	Fungsi lock pada caster akan maksimal jika posisi bed diletakkan pada lantai datar	Pengunaan yang terus menerus dan tidak benar dapat merusak fungsi lock		
		Pengaturan posisi ketinggian sandaran punggung dan kepala menggunakan gear dengan 4 tingkat penyesuaian untuk back raise, mulai dari posisi 0° sampai posisi maksimal	Pengoperasian secara manual dengan menaikkan sampai mengunci pada posisi tertentu dan pada saat akan mengembalikan pada posisi 0° back ditekan sampai ketinggian maksimal kemudian release sampai posisi 0°	Beban yang berlebih dan pemakaian terus menerus dapat menyebabkan gear rusak		



