

OPERASIONAL DAN MANUAL CB 7012 D-ST

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	CB 7012 D-ST	Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan 2 Crank (adjustable hi-lo, foot raise) dan 1 Cylinder gas lift (back raise)	Pengoperasian secara Manual dengan cara diputar kekiri untuk turun dan putar ke kanan untuk naik	Penggunaan crank yang tidak benar akan menyebabkan crank menjadi cepat rusak
		Crank ke-1 berfungsi untuk mengatur ketinggian tempat tidur dari permukaan lantai (naik dan turun)		Penempatan kembali crank ketempatnya setelah pemakaian akan menghindarkan potensi kecelakaan dan kerusakan karena benturan
		Crank ke-2 berfungsi untuk mengatur datar dan sudut kemiringan posisi lutut dan kaki (sudut datar dan tekuk)	Pengoperasian secara manual dengan cara menekan secara bersamaan handle cylinder yang ada di posisi kiri dan kanan atas sandaran	Beban yang berlebihan akan membuat fungsi cylinder cepat rusak
		Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan cylinder gas untuk mengatur posisi sudut kemiringan sandaran (Back Raise)		Benturan dan pengoperasian yang salah akan menyebabkan kondisi H/F board cepat rusak
		Aksesoris berupa head board dan foot board diatas bagian kepala dan dibawah bagian kaki ranjang berfungsi untuk menjaga posisi pasien tetap di tengah dan berfungsi juga sebagai pegangan pada saat akan memindahkan/ menggeser tempat tidur		Pengoperasian secara manual dengan menggunakan lock pin sebagai pengunci
		Lebar Bottom 100 mm lebih lebar dari standar bed	Memberikan kenyamanan dan keleluasaan pada pasien untuk berubah posisi tidur karena bed lebih lebar dari standar	Pemberian beban yang berlebih/ penggunaan lebih dari satu orang akan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan
		Mengunakan penggerak roda caster dengan double lock system untuk keamanan saat parkir	Double lock terdiri dari lock caster kanan depan dan kiri belakang	Pemakaian yang terus menerus dan kasar akan membuat sistem lock cepat rusak



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

OPERATION SYSTEM

A unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustment.



Crank operation system

Back raise adjustment

CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Adjustable Hi-Lo, back raise, and foot raise manual by crank, adjustable back raise with cylinder gas control

Accessories Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003) & Folding Side Rail (FSR-001)

Lock System Double Lock System (CB-3012 D, CB-7012 D), Four Lock System (CB-3012 D4)

Weight (kg) Approx. 90 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Frame Material** Steel

Dimension (mm) Bed (W 932, L 2141, H 654-994, H/F Board (W 932)

PRODUCT DIMENSION

