


OPERASIONAL DAN MANUAL CB 3012 D4-ST

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPEKIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	3012 D4-ST	Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan 2 Crank (adjustable hi-lo, foot raise) dan 1 Cylinder gas lift (back raise)	Pengoperasian secara Manual dengan cara diputar kekiri untuk turun dan putar ke kanan untuk naik	Penggunaan crank yang tidak benar akan menyebabkan crank menjadi cepat rusak
		Crank ke-1 berfungsi untuk mengatur ketinggian tempat tidur dari permukaan lantai (naik dan turun)		Penempatan kembali crank ketempatnya setelah pemakaian akan menghindarkan potensi kecelakaan dan kerusakan karena benturan
		Crank ke-2 berfungsi untuk mengatur datar dan sudut kemiringan posisi lutut dan kaki (sudut datar dan tekuk)	Pengoperasian secara manual dengan cara menekan secara bersamaan handle cylinder yang ada di posisi kiri dan kanan atas sandaran	Beban yang berlebihan akan membuat fungsi cylinder cepat rusak
		Sistem pengoperasian secara manual dengan menggunakan cylinder gas untuk mengatur posisi sudut kemiringan sandaran (Back Raise)		Benturan dan pengoperasian yang salah akan menyebabkan kondisi H/F board cepat rusak
		Aksesoris berupa head board dan foot board diatas bagian kepala dan dibawah bagian kaki ranjang berfungsi untuk menjaga posisi pasien tetap di tengah dan berfungsi juga sebagai pegangan pada saat akan memindahkan/ menggeser tempat tidur		
		Penggunaan four lock caster (dua di depan dan dua dibelakang) berfungsi untuk memberikan kestabilan dan keamanan pada saat posisi ranjang dalam kondisi terparkir	Pengoperasian secara manual dengan cara menekan handle pada caster dengan menggunakan kaki	Pengoperasian yang salah dan dengan cara paksa akan menyebabkan fungsi handle serta Lock pada caster akan cepat rusak (patah)



FEATURES & PROCEDURES

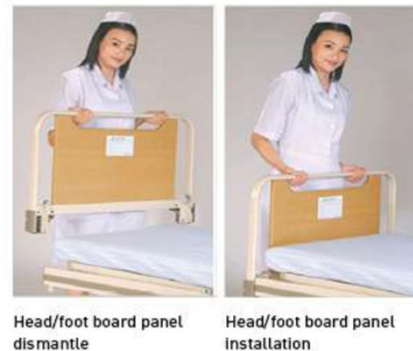

OPERATION SYSTEM

A unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustment.



Crank operation system Back raise adjustment

CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Adjustable Hi-Lo, back raise, and foot raise manual by crank, adjustable back raise with cylinder gas control

Accessories Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003) & Folding Side Rail (FSR-001)

Lock System Double Lock System (CB-3012 D, CB-7012 D), Four Lock System (CB-3012 D4)

Weight (kg) Approx. 90 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Frame Material** Steel

Dimension (mm) Bed (W 932, L 2141, H 654-994, H/F Board (W 932)

PRODUCT DIMENSION

