



TYPE	PENGUNAAN	PEMASANGAN	PEMELIHARAAN
CB 3003 PLUS	Dirancang untuk digunakan sebagai tempat tidur pasien di Institusi kesehatan seperti rumah sakit atau perawatan pasien secara privat	Terdapat 3 Crank yang memiliki fungsi tersendiri terkait pengaturan Posisi Bottom Frame. Ketika handle di gerakan searah jarum jam, maka Crank akan memutar dan mengontrol Pipa besi Torsi. Gerakan Handle Crank 3 (paling kanan) searah jarum jam, dan Head rest akan bergerak, Gerakan Handle Crank 2 (tengah) searah jarum jam, dan Lower Frame akan bergerak naik dan turun, gerakan Crank 1 (paling kiri) Foot Rest akan bergerak	1. Ranjang harus dibersihkan dan didesinfeksi setiap minggu dan atau sebelum pasien baru menggunakan ranjang 2. Matras harus dilepaskan dari ranjang untuk dibersihkan
	Difungsikan sebagai pendukung kebutuhan khusus untuk orang-orang yang sakit, Difabel, dan orang-orang berkebutuhan khusus (menyusui dan jompo).	Siapkan Side Rail dan Posisikan tepat pada insert yang tersedia pada Side Frame, Pada saat akan instalasi, Posisikan Side Rail pada posisi di atas - Pasang Bolt beserta Ring pada Insert yang telah tersedia, dan kencangkan menggunakan Kunci L (L key) atau Screwdriver (+) sampai dengan batas pengencangan bolt Langkah melipat dan menaikkan Side Rail adalah sebagai berikut: - Tarik kunci side rail yang berada pada frame side rail - Lepas tarikan kunci dan biarkan Side Rail bergerak sendiri secara perlahan ke arah bawah	Setelah ranjang dibersihkan seka semua permukaan ranjang dengan natrium dikloroisosianuat (NADCC) pada konsentrasi 1000 bagian per juta (0.1%) dari klorin yang tersedia
	Sistem pengoperasian secara manual bekerja secara manual menggunakan sistem Crank, untuk menyesuaikan ketinggian ranjang (High-Low) dan pada posisi duduk yang nyaman dan posisi kejut atau posisi jantung (head rest)	Siapkan Head/Foot Board pada posisinya (Head di bagian belakang (area kepala pasien) dan Foot bagian depan(area kaki pasien)	crank handle harus di cek secara berkala dengan cara diputar ke kiri dan kekakan serta ditambahkan grease jika sudah tidak normal
	Dilengkapi dengan alat bantu lainnya seperti seperti pegangan tangan (fix/loose side-rail & Folding Side rail) pada sisi ranjang untuk mencegah jatuh, atau Caster (Lock unlock) untuk memudahkan pergerakan ranjang secara konstan	Pasangkan Bracket hook yang terdapat pada board dengan hook yang terdapat pada main frame - Setelah Head/foot board terpasang, pastikan Bracket Lock terkunci	Periksa kelancaran dalam pemasangan dan pelepasan side rail
	Ranjang digunakan pada posisi yang bisa berpindah pindah karena ranjang dilengkapi dengan roda castor yang berfungsi untuk memudahkan saat dipindah	Kunci Caster di ujung kaki ranjang memiliki tiga posisi seperti yang ditunjukkan berikut ini: • Kunci Caster diterapkan pada 2 caster, masing-masing 1 pcs di bagian Head dan 1 pcs di bagian Foot. • FREE : keempat Caster bebas bergerak dan berputar. *3. Ranjang dilengkapi dengan 2 set rel sisi ¾ panjang atau rel sisi yang bisa dipisahkan dan dilipat	lakukan pemeriksaan visual kondisi castor secara rutin untuk memastikan castor masih berfungsi secara baik periksa matras jika terjadi kerusakan dan kemungkinan terjadinya air masuk kedalam matras

CB 3003 PLUS

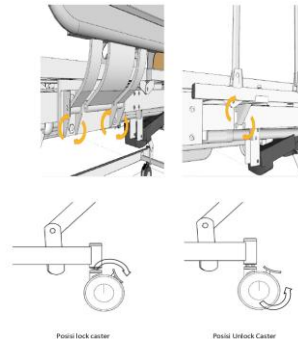

Fitur Head/Foot Board

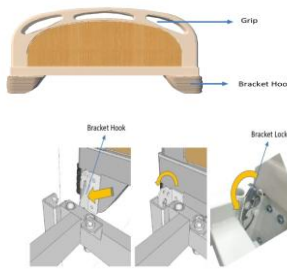

Standard Function

- Operating System : 3 Crank operation for High-Low, Head Rest and Foot Rest positions
- Position :
 - High - low: Manual operation with Crank
 - Head rest: Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
 - Foot Rest : Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
- Primary :
 - Simple design, no sharp corners (smooth surface)
 - Easy operating mechanism, with Crank System
 - Sturdy and anti-rust
 - Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system
- Lock System : Double Lock System on the Wheels
- Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail
Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step
Aimate Cpro Mattress / Urethane

Product Dimension

- Dimension : L : Total 2230 mm (include HF Board)
1956 mm (Bottom assy Length)
- W : Total 1030 mm
915 mm (Bottom assy Width)
- D : 760 ~ 1005 mm (from floor to Head Board)
327 ~ 667 mm (from floor to Bottom Assy)

Product Weight

- Weight : ± 90KG
- Load Capacity : ± 400KG (Static) & ±170KG (Dynamic)
- Packing Dimension : 2050 mm (L) x 1070 mm (W) x 190 mm (D)

