

CB3300Plus



FEATURES & PROCEDURES



Fungsi Standar

- Operating System** : Motor penggerak untuk posisi tinggi-rendah, sandaran kaki dan sandaran kepala
- Posisi** : - Tinggi – Rendah : Pengoperasian secara otomatis menggunakan alat pengontrol genggam dengan motor penggerak
 - Sandaran Kepala dan Kaki : Pengoperasian secara otomatis menggunakan alat pengontrol genggam dengan motor penggerak
- Utama** : - Desain sederhana, tidak ada sudut tajam (Permukaan halus)
 - Mekanisme pengoperasian yang mudah, dengan motor penggerak
 - Kokoh dan anti karat
 - Roda yang mudah digerakkan dan ditempatkan, dengan sistem kunci dan tidak kunci
- Sistem kunci** : Sistem kunci total
- Asesoris** : Tiang IV (Pilihan 2 Tipe) dan Side Rail / Side rail Lipat
 Lemari sisi tempat tidur, Meja atas tempat tidur, dan pijakan kaki
 Matrass Airmate Cpro / Urethane

Ukuran Produk

Ukuran
 P x L x T : 2230 x 1030 x 760~1005

Berat Produk

Berat Kosong : ± 90KG
 Berat beban : ± 400KG (Statis)
 & ±170KG (Dinamis)
 Ukuran Paking : 2050 x 1070 mm x 190

Lot No :
 Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mintareja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

AC 220V - 50/60Hz
 Only usable 2 with ON/18 into OFF
 Int. 150%, Max 2 meter 18 min.

Icons: +230 Kg, 1 P x 4, +185 Kg, AC, Home, Wheel, Lock, Unlock.

**MANUFACTURE LABEL AND LOT
 NUMBER**

Chitose


**MANUFACTURER
 LABEL**



SNI LABEL




IZIN EDAR KEMENKES
 bahan dasar : stiker warna putih
 posisi penempatan pada Frame

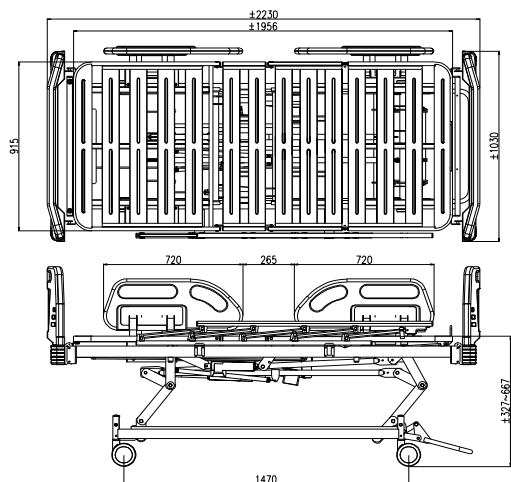

CB3300Plus



FEATURES & PROCEDURES

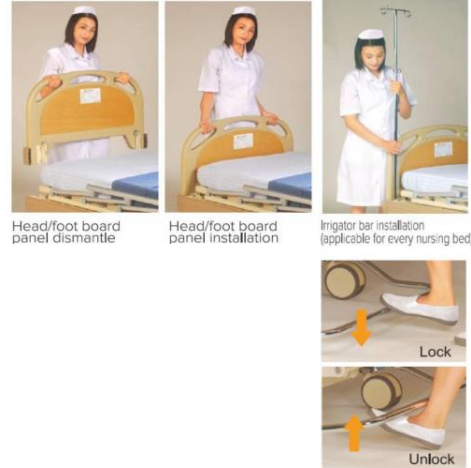

Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

Irrigator bar installation (applicable for every nursing bed)

Lock

Unlock

Standard Function

Operating System : Motor Actuator for High-Low, Foot Rest, and Head Rest positions
Position : - High – low: Automatic operation via handheld Controller

- Head & Foot rest: Automatic operation via handheld controller with Motor actuator

Primary : - Simple design, no sharp corners (smooth surface)
- Easy operating mechanism, with Motor Actuator
- Sturdy and anti-rust
- Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system

Lock System : Total Lock System

Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail
Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step
Airmate Cpro Mattress / Urethane

Product Dimension

Dimension

L x W x D : 2230 x 1030 x 760~1005

Product Weight

Weight : ± 90KG

Load Capacity : ± 400KG (Static)
& ±170KG (Dynamic)

Packing Dimension : 2050 x 1070 mm x 190

Lot No :
Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
Distributor Center Jln. H.M.S.
Mintaredja Baros Cimahi 40521,
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

AC 230V~50/60Hz
Duty cycle 2 min ON/18 min OFF
In: 10%, Max 2 min/ 18 min.

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER




IZIN EDAR KEMENKES

bahan dasar : sticker warna putih
posisi penempatan pada Frame



Chitose[®]
MANUFACTURER
LABEL



SNI LABEL

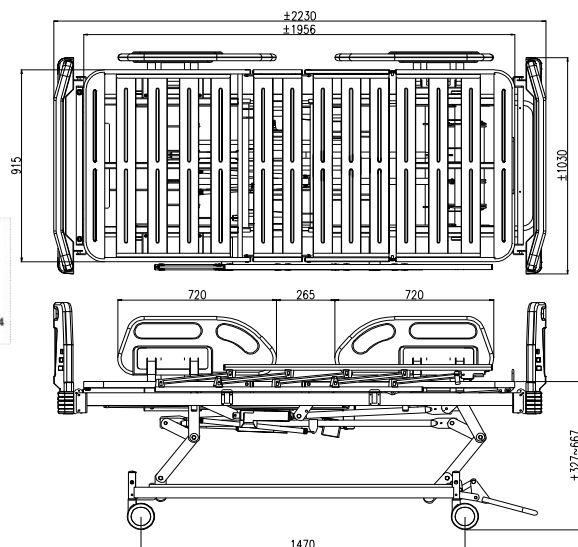

Warning Label and Sign

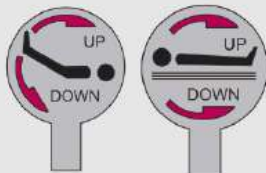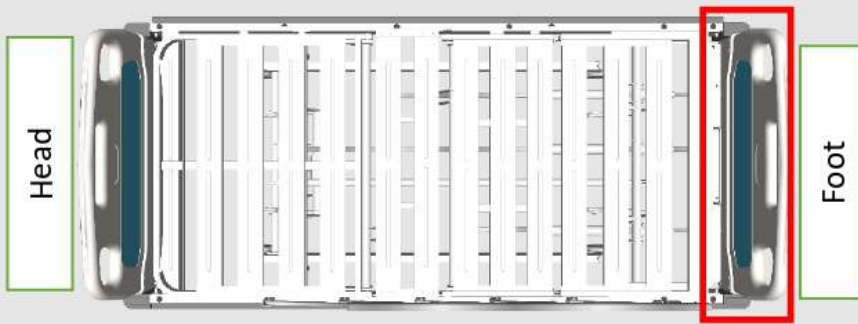

CRANK LABEL

**PERHATIAN !
PENGOPERASIAN HANDLE CRANK**

- Sebelum memutar handle crank, harap perhatikan :
Tangan , Anak-anak, Hewan peliharaan, alat-alat dan bahan lain
- Before turning the crank handle please watch :
hands, children, pets, other tools or materials
- Setelah memutar Handle, pasang kembali pada posisi terkunci untuk menghindari jatuh tiba-tiba
- After turning the crank handle, put it back on locked position in order to avoid sudden falling down.
- Untuk menghindari terkena kaki, pasang Handle Crank pada posisi awal (terkunci). Jika terkena, maka Bed akan jatuh
In order to avoiding hit, put the crank handle back on first position (locked). If it is not, the bed might fall down.

Caution Handle operation

Chitose bed
KEMENKES RI AKD: _____

IZIN EDAR KEMENKES

PERHATIAN !

- Jangan menempatkan tangan dibawah tempat tidur.
Do not place your hand under the bed
- Tempat tidur hanya digunakan untuk satu orang.
Capacity for one person only

CAUTION LABEL

Lot No : _____

Type : _____

PT. Chitose Internasional Tbk
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
Distributor Center Jln. H.M.S.
Mintaredja Baros Cimahi 40521,
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

- 1 Lot Number and Product Type
- 2 Manufacture Information
- 3 Safe Workload Sign and Maksimum Weight Sign
- 4 Use Appropriate mattress Sign
See Manual Instruction Sign
- 5 Applied Part Sign
Do not Dispose as Household Waste Sign
Indoor Using Only Sign

Warning Label and Sign



SAFETY NOTICE
PERINGATAN KESELAMATAN

- Jangan menggunakan tempat tidur ketika dalam kondisi rusak.
Do not use the bed if improper condition is found.
- Pada saat memutar pegangan engkol, harap perhatikan bagian tangan, kaki atau anggota tubuh dan pasien tidak berada dibawah tempat tidur dan di tengah-tengah rel samping.
When turning the crank handle, please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the rails.
- Ketika memutar pegangan engkol ke atas dan ke bawah, hanya memperbolehkan satu pasien berada di atas tempat tidur.
When turning the crank handle up or down, only one person allow to be on the bed.
- Ketika pasien tertidur, rel samping harus dalam keadaan terpasang berdiri untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur.
When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- Setelah memutar pegangan engkol, pegangan engkol harus ditempatkan pada posisi semula (terkunci) dan melipat kedalam.
After turning up and down the crank handle must be put back on first position (locked) and fold inside.
- Pegangan engkol harus selalu pada posisi terkunci dan melipat kedalam untuk menghindari benturan dengan kaki.
Crank handle must be always in locked position and fold inside to avoid against the feet.

DILARANG MELEPAS LABEL INI

PT. Chitose Internasional Tbk.
Telp: (022) 8031900 - Fax: (022) 8031805

SAFETY NOTICE



SAFETY LABEL