

PETUNJUK PENGGUNAAN, MATERI PELATIHAN, PETUNJUK PEMASANGAN SERTA PEMELIHARAAN CB 3003 D

No	TYPE	PENGGUNAAN	PEMASANGAN	PEMELIHARAAN	SPESIFIKASI KEMASAN
1	CB 3003 D	Dirancang untuk digunakan sebagai tempat tidur rawat inap pasien pada lembaga medis, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dsb, juga bisa digunakan sebagai tempat tidur dipanti jompo	Aksesoris berupa head board dan foot board diatas bagian kepala dan dibawah bagian kaki ranjang dipasang dengan menggunakan bracket dan lock pin sebagai pengunci (gambar)	Head board dan footboard dicek secara berkala untuk emastikan bracket dan pin masih berfungsi dengan baik	CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
		Sistem pengaturan dengan 3 crank yang dipergunakan untuk mengatur posisi tinggi bed (adjustable Hi-Lo), mengatur tinggi dan rendah posisi punggung pasien (Back raise) dan mengatur tinggi rendahnya posisi tekukan pada lutut (foot Raise)	Memutar crank Hi-Lo kearah kanan untuk menaikkan posisi tempat tidur dan kearah kiri untuk menurunkan, Memutar crank back Rise kearah kanan untuk menaikkan sudut kemiringan sandaran dan kearah kiri untuk menurunkan sudut sandaran serta crank foot raise kearah kanan untuk menaikkan sudut ketinggian dan kearah kiri untuk menurunkan sudut ketinggian	1. Ranjang harus dibersihkan dan didesinfeksi setiap minggu dan atau sebelum pasien baru menggunakan ranjang 2. Papan kepala, kaki dan bantal platform matrass harus dilepaskan dari ranjang untuk dibersihkan	
		System penguncian roda dengan menggunakan system Double lock caster atau satu caster lock di depan dan satu caster lock dibelakang untuk menjamin keamanan saat posisi parkir	Pengoperasian lock dan free pada caster dilakukan secara manual dengan cara menekan handle pada caster dengan menggunakan kaki	Setelah ranjang dibersihkan seka semua permukaan ranjang dengan natrium dikloroisosianat (NADCC) pada konsentrasi 1000 bagian per juta (0.1%) dari klorin yang tersedia	
		Digunakan untuk pasien dewasa dan tidak diperuntukkan untuk pasien bayi atau anak-anak balita Tempat tidur tidak boleh digunakan untuk dua orang atau lebih, karena akan melebihi beban maksimum dari tempat tidur	side rail sebagai pengaman di sisi kiri dan kanan ranjang dipasang sesuai dengan lubang yang tersedia	Putaran crank dicek secara berkala apakah fungsinya masih baik, lancar tidak berat dan tidak bunyi	

OPTIONS



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle



Head/foot board panel installation

OPERATION SYSTEM

A unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustment.




Crank operation system

Side rail compartment

CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.

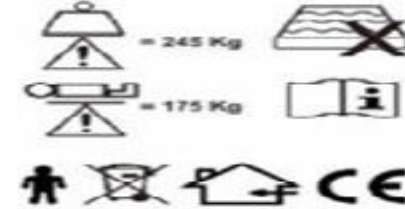

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Adjustable Hi-Lo, back raise, and foot raise manual by crank

Accessories Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003) & Folding Side Rail (FSR-001)

Lock System Double Lock System

Weight (kg) Approx. 90 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Frame Material** Steel

Dimension (mm) Bed (W 932, L 2141, H 654-994, H/F Board (W 932))

PRODUCT DIMENSION

