


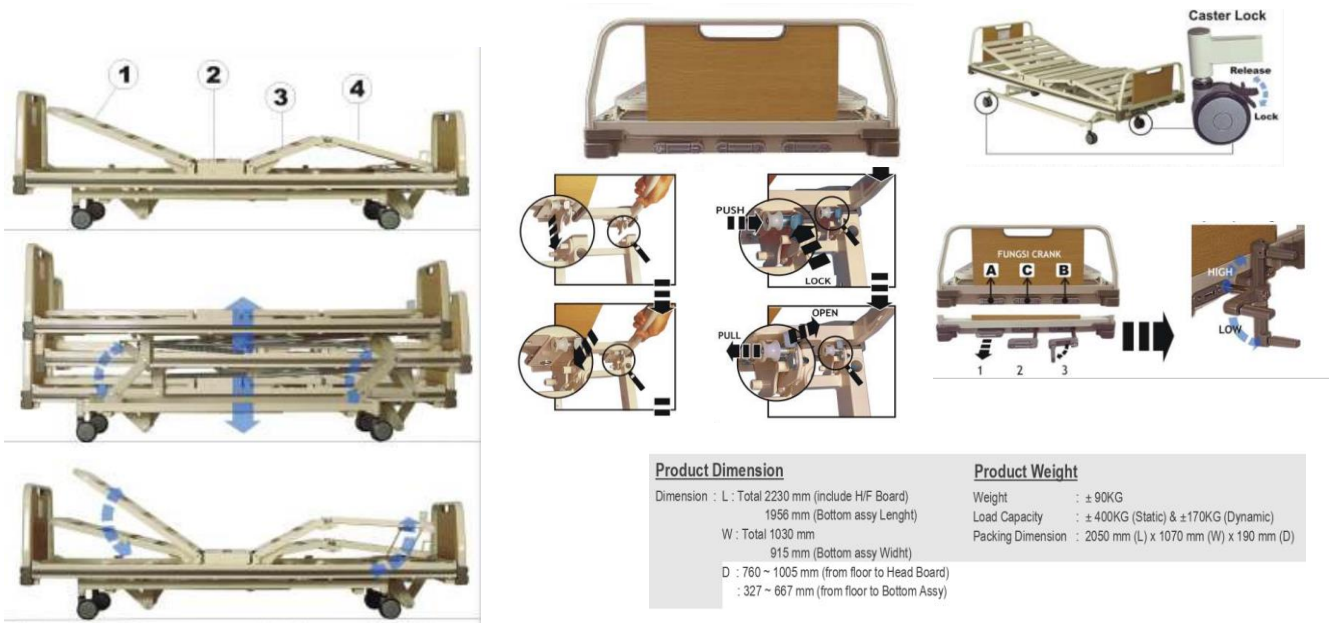
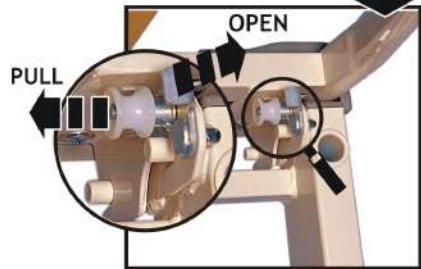


TYPE	PENGUNAAN	PEMASANGAN	PEMELIHARAAN
CB 3003 D	Dirancang untuk digunakan sebagai tempat tidur pasien di Institusi kesehatan seperti rumah sakit atau perawatan pasien secara privat	Terdapat 3 Crank yang memiliki fungsi tersendiri terkait pengaturan Posisi Bottom Frame. Ketika handle di gerakan searah jarum jam, maka Crank akan memutar dan mengontrol Pipa besi Torsi. Gerakkan Handle Crank 3 (paling kanan) searah jarum jam, dan Head rest akan bergerak, Gerakkan Handle Crank 2 (tengah) searah jarum jam, dan Lower Frame akan bergerak naik dan turun, gerakkan Crank 1 (paling kiri) Foot Rest akan bergerak	1. Ranjang harus dibersihkan dan didesinfeksi setiap minggu dan atau sebelum pasien baru menggunakan ranjang 2. Matrass harus dilepaskan dari ranjang untuk dibersihkan
	Difungsikan sebagai pendukung kebutuhan khusus untuk orang-orang yang sakit, Difabel, dan orang-orang berkebutuhan khusus (menyusui dan jompo).	Siapkan Side Rail dan Posisikan tepat pada insert yang tersedia pada Side Frame, Pada saat akan instalasi, Posisikan Side Rail pada posisi di atas	Setelah ranjang dibersihkan seka semua permukaan ranjang dengan natrium dikloroisosianuat (NADCC) pada konsentrasi 1000 bagian per juta (0.1%) dari klorin yang tersedia
	Sistem pengoperasian secara manual bekerja secara manual menggunakan sistem Crank, untuk menyesuaikan ketinggian ranjang (High-Low) dan pada posisi duduk yang nyaman dan posisi kejut atau posisi jantung (head rest)	Siapkan Head/Foot Board pada posisinya (Head di bagian belakang (area kepala pasien) dan Foot bagian depan(area kaki pasien)	crank handle harus di cek secara berkala dengan cara diputar kekiri dan kekakan serta ditambahkan grease jika sudah tidak normal
	Dilengkapi dengan alat bantu lainnya seperti pegangan tangan (fix/loose side-rail & Folding Side rail) pada sisi ranjang untuk mencegah jatuh, atau Caster (Lock unlock) untuk memudahkan pergerakan ranjang secara konstan	Pasangkan Bracket hook yang terdapat pada board dengan hook yang terdapat pada main frame - Setelah Head/foot board terpasang, pastikan Bracket Lock terkunci	Periksa kelancaran dalam pemasangan dan pelepasan side rail
	Ranjang digunakan pada posisi yang bisa berpindah pindah karena ranjang dilengkapi dengan roda castor yang berfungsi untuk memudahkan saat dipindah	Kunci Caster di ujung kaki ranjang memiliki tiga posisi seperti yang ditunjukkan berikut ini: • Kunci Caster diterapkan pada 2 caster, masing-masing 1 pcs di bagian Head dan 1 pcs di bagian Foot. • FREE : keempat Caster bebas bergerak dan berputar. '3. Ranjang dilengkapi dengan 2 set rel sisi ¼ panjang atau rel sisi yang bisa dipisahkan dan dilipat	lakukan pemeriksaan visual kondisi castor secara rutin untuk memastikan castor masih berfungsi secara baik periksa matrass jika terjadi kerusakan dan kemungkinan terjadinya air masuk kedalam matrass

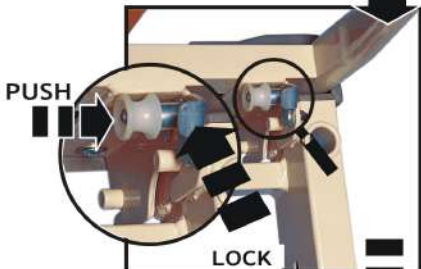


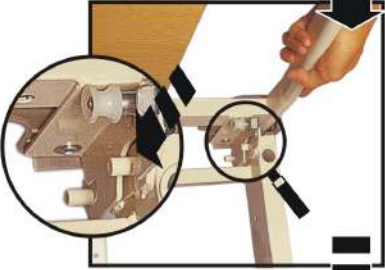


Foot Board & Head Board Installation

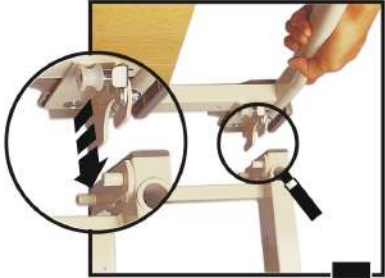

Side Rail Hole

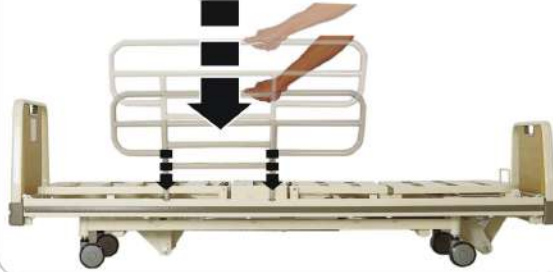

Crank System

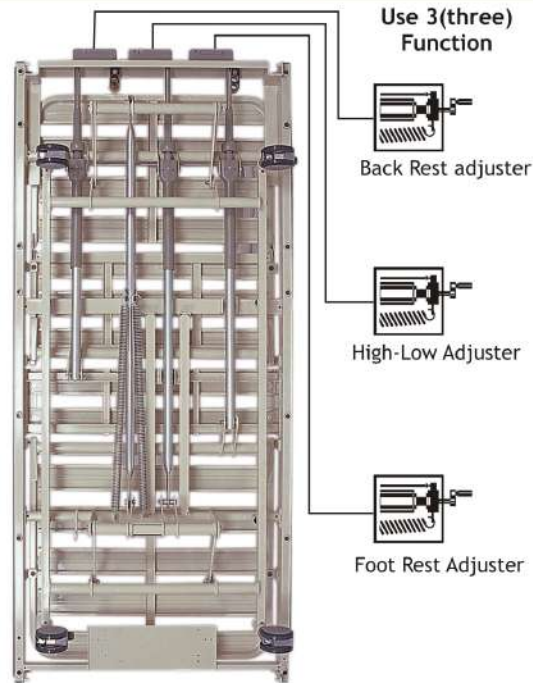

Manufactured by :
PT. Chitose Indonesia Mfg

Chitose[®]
INNOVATION BY YOUR INSPIRATION




Nursing Bed

Health Therapy Product

Type **CB-3003**

Practice
Comfort
Strength
Safety
Clean
&
Quiet

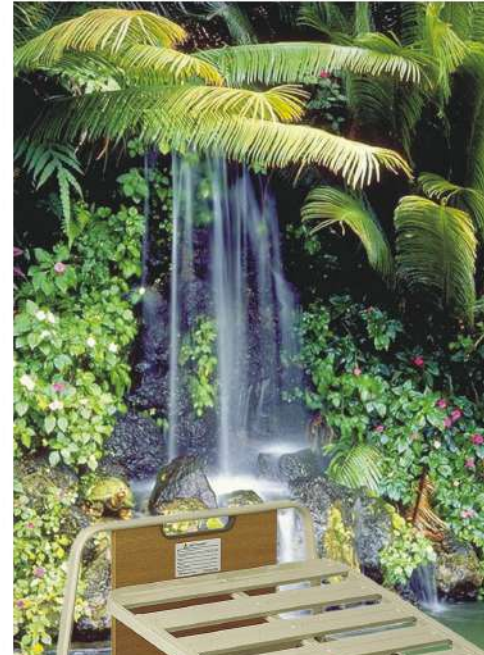


Chitose[®]

INNOVATION BY YOUR INSPIRATION



Ergonomis

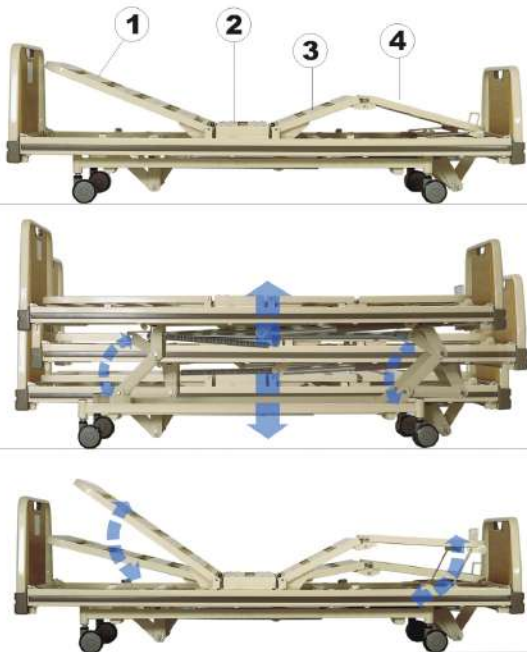

The body buffer part consist of four rigid steel panel to support head and back rest.

Double Lock



Independent lock caster system at front and back wheel guarant the safety and stability when bed is stop (condition stood still)

High-Low Crank System




An interesting crank shape to adjust the height bed position wanted .

Panel Design




Panel design on foot board and and head board use wood material featuring simple secure, clean, health and nature.

Dimension

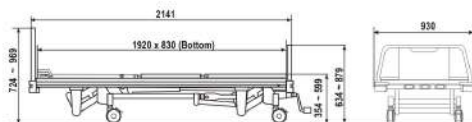


Operational Standard Crank

Way of Opening Crank

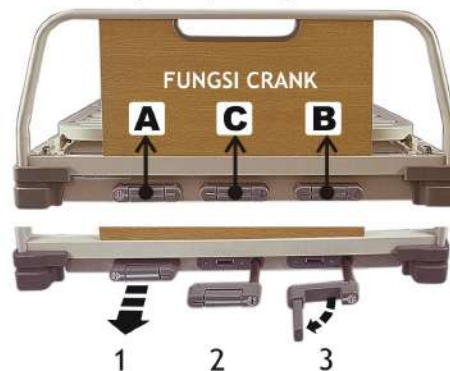

Way of Operating Crank

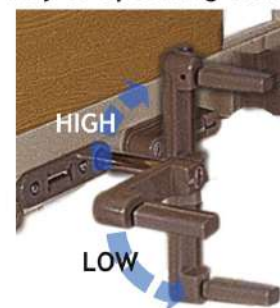


A Back Rest Bottom High Position

B Foot Rest Bottom High Position



Back Rest And Foot Rest Position Adjuster

C Bed High Adjuster High

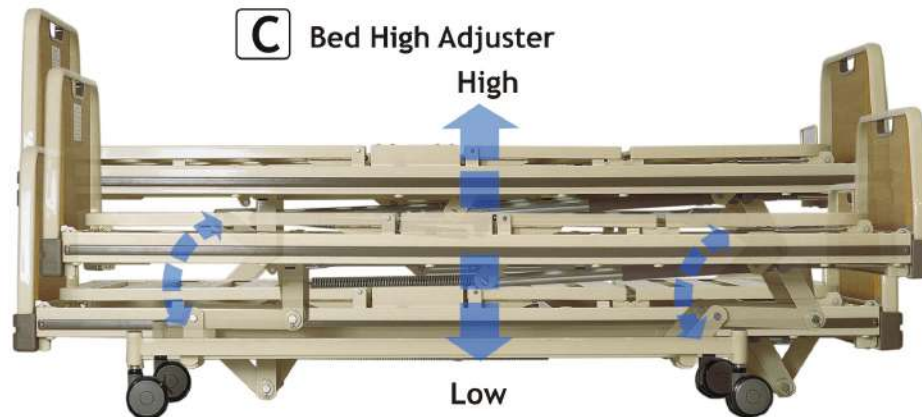

Low