


PETUNJUK PENGGUNAAN, MATERI PELATIHAN, PETUNJUK PEMASANGAN SERTA PEMELIHARAAN CHITOSE HOSPITAL BED CB 3300 D


No	TYPE	PENGGUNAAN	PEMASANGAN	PEMELIHARAAN
3	CB3300 D	Dirancang untuk digunakan sebagai tempat tidur pasien rawat inap pada lembaga medis, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dsb, juga digunakan untuk fasilitas perawatan orang tua di lembaga panti jompo	untuk pemasangan <i>H/F Board</i> pada <i>Main frame Nursing Bed</i> adalah dengan cara mengaitkan <i>Bracket hook</i> yang terdapat di <i>H/F Board</i> pada <i>Pin Stopper</i> , lalu pastikan terkunci dengan <i>stopper lock</i>	1. Ranjang harus dibersihkan dan didisinfeksi setiap minggu dan atau sebelum pasien baru menggunakan ranjang 2. Matras harus dilepaskan dari ranjang untuk dibersihkan
		Digunakan untuk pasien dewasa dan tidak diperuntukkan untuk pasien bayi atau anak-anak	pemasangan matras dilakukan secara manual dengan cara meletakkan matras pada permukaan ranjang, matras yang digunakan matras dengan ukuran dan jenis yang benar sesuai rekomendasi pabrik. Matras yang tidak sesuai bisa menimbulkan bahaya.	Setelah ranjang dibersihkan kemudian seka semua permukaan ranjang dengan natrium dikloroisosianuat (NADCC) pada konsentrasi 1000 bagian per juta (0.1%) dari klorin yang tersedia
		Tempat tidur tidak boleh digunakan untuk dua orang atau lebih, karena akan melebihi beban maksimum dari tempat tidur	<i>Nursing Bed CB 3300 D</i> di bangun dengan karakteristik konstruksi pipa besi dan pelat meliputi permukaan untuk berbaring, konstruksi permukaan bawah dan aksesoris untuk memberikan perawatan yang lebih ergonomis. <i>Nursing Bed CB 3300 D</i> bekerja secara otomatis menggunakan sistem elektrik dengan digerakkan oleh <i>Motor actuator</i> , untuk menyesuaikan ketinggian ranjang, sandaran kaki, sandaran kepala (<i>High-Low, Foot Rest, Head Rest</i>) pada posisi duduk yang nyaman serta posisi kejut dan posisi jantung. <i>Nursing Bed CB 3300 D</i> menggunakan motor penggerak yang di aplikasikan pada pipa penggerak, Platform Matras untuk menggerakkan sandaran punggung serta kaki pada	1. Lepaskan sambungan listrik ranjang dari pasokan listrik sebelum memulai kegiatan pembersihan atau pemeliharaan. 2. Untuk menghindari Dekontaminasi, Jangan biarkan steker listrik atau kabel catu daya basah. 3. Jika <i>remote control</i> jatuh ke permukaan yang keras, periksa apakah semua tombol berfungsi dengan benar. 4. Letakkan <i>remote control</i> pada rel sisi dengan menggunakan klip pada bagian belakangnya; hal ini akan membantu mencegah pengoperasian <i>remote control</i> yang tidak disengaja.
		Ranjang ini di bangun dengan karakteristik konstruksi besi pipa dan pelat meliputi permukaan berbaring, Kontruksi permukaan bawah dan aksesoris. Untuk perawatan yang lebih ergonomis, <i>Nursing Bed CB 3300 D</i> bekerja secara otomatis dengan sistem <i>Motor Actuator</i> yang dikendalikan dari <i>remote control</i>	Penguncian dan pelepasan kunci caster dilakukan secara manual dengan cara menekan atau mengangkat tuas pengunci dengan menggunakan kaki	Periksa kelancaran dalam pemasangan dan pelepasan <i>side rail</i>
		Penggunaan <i>double lock castor</i> berfungsi untuk memberikan kestabilan dan keamanan penguncian caster pada saat posisi ranjang dalam kondisi terparkir	<i>side rail</i> sebagai pengaman di sisi kiri dan kanan ranjang dipasang sesuai dengan lubang yang tersedia. Langkah pemasangan <i>Side Rail</i> adalah sebagai berikut : - Siapkan <i>Side Rail</i> dan Posisikan tepat pada <i>insert</i> yang tersedia pada <i>Side Frame</i> , Pada saat akan pemasangan, Posisikan <i>Side Rail</i> pada posisi di atas lubang <i>insert</i> . - Pasang <i>Bolt</i> beserta Ring pada <i>Insert</i> yang telah tersedia, dan kencangkan menggunakan Kunci L (<i>L key</i>) atau <i>Screwdriver</i> (+) sampai dengan batas pengencangan <i>bolt</i> . Langkah melipat dan menaikkan <i>Side Rail</i> adalah sebagai berikut - Tarik kunci <i>side rail</i> yang berada pada <i>frame side rail</i> - Lepas tarikan kunci dan biarkan <i>Side Rail</i> bergerak sendiri secara perlahan ke arah bawah	lakukan pemeriksaan visual kondisi caster secara rutin untuk memastikan caster masih berfungsi secara baik
Ranjang digunakan pada posisi yang bisa berpindah pindah karena ranjang dilengkapi dengan roda castor yang berfungsi untuk memudahkan saat dipindah	Langkah melipat dan menaikkan <i>Side Rail</i> adalah sebagai berikut - Tarik kunci <i>side rail</i> yang berada pada <i>frame side rail</i> - Lepas tarikan kunci dan biarkan <i>Side Rail</i> bergerak sendiri secara perlahan ke arah bawah	periksa matras jika terjadi kerusakan dan kemungkinan terjadinya air masuk kedalam matras		

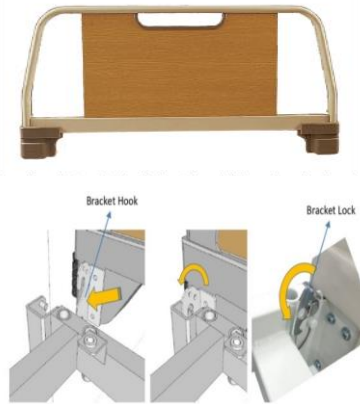

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Operating System : Adjustable Hi-Lo, back raise and foot raise automatic by motor
- Weight (kg) : Approx. 90
- Accessories : Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR-003)
Folding Side Rail (FSR-001)
- Frame Finishing : Powder Coating
- Lock System : Total Lock System
Double Lock System
- Frame Color : Ivory
- Frame Material : Steel
- Dimension (mm) : Bed (W 932, L 2141, H 672~1012)
H/F Board (W 932)

PRODUCT DIMENSION

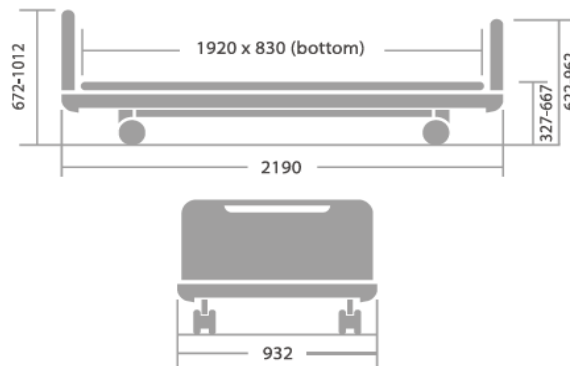

- = 250 Kg
-
- I P X 4
- = 185 Kg
-
-
-
-
-
-

AC 230V~.,50/60Hz
 Duty cycle 2 min ON/18 min OFF
 Int. : 10%, Max 2 min/ 18 min.