

KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA

Type : CB-3300D

No.	Karakteristik	Spesifikasi Kinerja	Analisa Resiko Alat	Spesifikasi Kemasan
1	<i>Bed</i> ini bisa disebut <i>electric bed</i> atau disebut juga <i>motor bed</i> , disebut <i>electric bed</i> karena <i>bed</i> ini membutuhkan daya listrik dan disebut <i>motor bed</i> karena semua penggerak <i>operating system</i> -nya menggunakan <i>motor actuator</i>	Setelah <i>power</i> listrik masuk, maka <i>power</i> AC akan dirubah menjadi DC oleh <i>control box</i> untuk memberikan <i>power</i> kepada <i>motor actuator</i> dan <i>remote control</i> untuk mengendalikan semua penggerak <i>motor actuator</i>	Semua kabel harus aman dari faktor kejejit atau terkelupas karena apabila terjadi, akan mengakibatkan kebocoran listrik yang berdampak kepada keamanan dan keselamatan pengguna	CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
2	Penggerak <i>operating system</i> terdiri dari satu buah <i>control box</i> , satu buah <i>remote control</i> dan tiga buah <i>motor actuator</i> bagian <i>foot</i> menggunakan <i>actuator</i> dengan <i>stroke</i> 100 mm, <i>Hi-Lo</i> menggunakan <i>stroke</i> 200 mm dan <i>bed</i> menggunakan <i>stroke</i> 200 mm	Sudut untuk kemiringan bagian <i>foot</i> dengan <i>stroke</i> 100 mm menghasilkan sudut 36°, ketinggian untuk bagian <i>Hi-Lo</i> dengan <i>stroke</i> 200 mm sebesar 340 mm dari awal ketinggian sebesar 327 mm, dan sudut untuk kemiringan bagian <i>back raise</i> dengan <i>stroke</i> 200 mm menghasilkan sudut 80°	<i>Bed</i> digunakan untuk satu orang, jika lebih dari satu orang maka motornya cepat rusak. Apabila <i>bottom</i> lutut dan <i>bottom</i> punggung diduduki pada posisi miring itu akan merusak <i>bottom</i> dan motor	
3	<i>Bed</i> ini menggunakan roda dengan sistem penguncian (<i>double lock caster</i>) dimana dua <i>caster free lock</i> dan dua <i>caster double lock</i> , pemasangan <i>caster</i> yang memiliki <i>lock</i> diletakan secara diagonal	Proses penguncian dan pelepasan kuncinya dilakukan dengan cara ditekan atau diinjak oleh kaki di bagian <i>caster</i> untuk penguncian, sedangkan pelepasan atau <i>release</i> pijakannya diangkat oleh ujung kaki	Masih terjadi pergerakan apabila terkena tabrakan pada saat kondisi <i>lock</i> akan mengakibatkan posisi <i>bed</i> berubah	



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

REMOTE SYSTEM

Remote control system enables the users to adjust his most comfortable position.



CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.

