
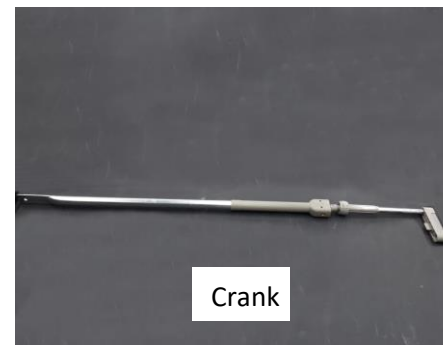


## Materi Pelatihan Perawatan Bed Tipe CB-7003D

**Tabel 1. Metoda dan Urutan Kerja Penggantian Crank Assy \* Kasus Hi-Lo**

No	Urutan Kerja	Metoda/Cara Kerja
1	Naikkan Bed sampai level tertinggi	Putar Crank Handle ke kanan dan berhenti dimana gaya naik menjadi lebih berat
2	Lepaskan kedua Spring	Lepaskan kedua Spring dengan menggunakan JIG Pengait
3	Turunkan Bed sampai ke level Terendah	Putar Crank Handle ke kiri dan berhenti diposisi stoper bertemu
4	Lepaskan Ujung Crank Rod Comple	Lepaskan Snap pin dan tarik Pin-nya
5	Lepaskan Crank ASSY	1. Buka Label Instuksi pada handle dan buka screw-nya, selanjutnya lepaskan handle.
		2. Lepaskan kedua bolt M10 yang menempel pada cross member
		3. Lepaskan Crank Assy
6	Pemasangan CRANK ASSY	1. Pada lubang Cross Frame Foot Side pasang handle dengan screw dan kencangkan
		2. Pasang kedua bolt M10 dan kencangkan
		3. Pasang ujung sumbu Rod pada Bracket torque Tube menggunakan Pin, collar dan snap pin.
7	Naikkan Bed sampai level tertinggi	Putar Crank Handle ke kanan dan berhenti dimana gaya naik menjadi lebih berat
8	Pasang kedua Spring	Pasang kedua Spring dengan menggunakan JIG pengait
9	Turunkan Bed sampai ke level Terendah	

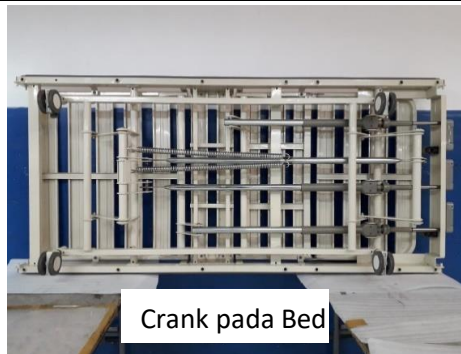

## Materi Pelatihan Perawatan Bed Tipe CB-7003D

Tabel 2. Metoda dan urutan kerja Penggantian Caster

No	Urutan Proses	Metoda/Cara Kerja
1	Siapkan semua yang berhubungan dengan pekerjaan penggantian	Naikkan bed dengan memutar crank handle searah jarum jam sampai ada cukup ruang (antara lantai dan caster), kemudian pasang dudukan pengganjal
2	Lepaskan Caster	Kendurkan Nut (mur) dengan kunci pas 21 mm dan lepaskan caster
3	Pasang Caster	Ulir caster dimasukkan ke (ulir) foot pipe setelah keras baru dikencangkan menggunakan kunci pas
4	Pastikan pemasangan sudah benar	Pastikan Spring Washer dia. 16 rata, tidak ada celah
5	Keluarkan dudukan pengganjal	Putar crank handle searah jarum jam setelah ada ruang maka dudukan pengganjal ditarik keluar.
6	Pastikan fungsi operasinya	Pastikan rotasi maju dan mundur secara mendatar tanpa ada kelainan. Pastikan tidak ada kelainan pada fungsi lock.

