
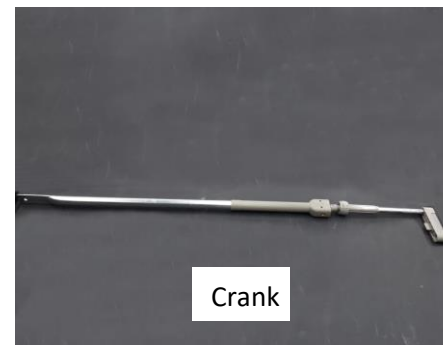


Materi Pelatihan Perawatan Bed Tipe CB-7003D

Tabel 1. Metoda dan Urutan Kerja Penggantian Crank Assy * Kasus Hi-Lo

No	Urutan Kerja	Metoda/Cara Kerja
1	Naikkan Bed sampai level tertinggi	Putar Crank Handle ke kanan dan berhenti dimana gaya naik menjadi lebih berat
2	Lepaskan kedua Spring	Lepaskan kedua Spring dengan menggunakan JIG Pengait
3	Turunkan Bed sampai ke level Terendah	Putar Crank Handle ke kiri dan berhenti diposisi stoper bertemu
4	Lepaskan Ujung Crank Rod Comple	Lepaskan Snap pin dan tarik Pin-nya
5	Lepaskan Crank ASSY	1. Buka Label Instuksi pada handle dan buka screw-nya, selanjutnya lepaskan handle.
		2. Lepaskan kedua bolt M10 yang menempel pada cross member
		3. Lepaskan Crank Assy
6	Pemasangan CRANK ASSY	1. Pada lubang Cross Frame Foot Side pasang handle dengan screw dan kencangkan
		2. Pasang kedua bolt M10 dan kencangkan
		3. Pasang ujung sumbu Rod pada Bracket torque Tube menggunakan Pin, collar dan snap pin.
7	Naikkan Bed sampai level tertinggi	Putar Crank Handle ke kanan dan berhenti dimana gaya naik menjadi lebih berat
8	Pasang kedua Spring	Pasang kedua Spring dengan menggunakan JIG pengait
9	Turunkan Bed sampai ke level Terendah	

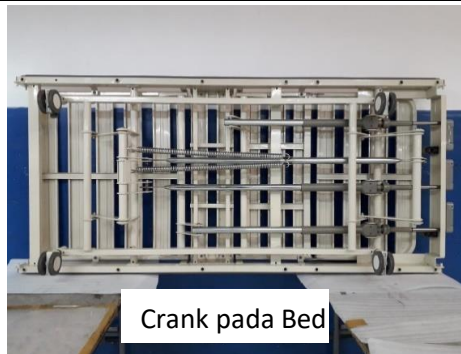





Materi Pelatihan Perawatan Bed Tipe CB-7003D

Tabel 2. Metoda dan urutan kerja Penggantian Caster


No	Urutan Proses	Metoda/Cara Kerja
1	Siapkan semua yang berhubungan dengan pekerjaan penggantian	Naikkan bed dengan memutar crank handle searah jarum jam sampai ada cukup ruang (antara lantai dan caster), kemudian pasang dudukan pengganjal
2	Lepaskan Caster	Kendurkan Nut (mur) dengan kunci pas 21 mm dan lepaskan caster
3	Pasang Caster	Ulir caster dimasukkan ke (ulir) foot pipe setelah keras baru dikencangkan menggunakan kunci pas
4	Pastikan pemasangan sudah benar	Pastikan Spring Washer dia. 16 rata, tidak ada celah
5	Keluarkan dudukan pengganjal	Putar crank handle searah jarum jam setelah ada ruang maka dudukan pengganjal ditarik keluar.
6	Pastikan fungsi operasinya	Pastikan rotasi maju dan mundur secara mendatar tanpa ada kelainan. Pastikan tidak ada kelainan pada fungsi lock.




Cara pemasangan Foot Board & Head Board

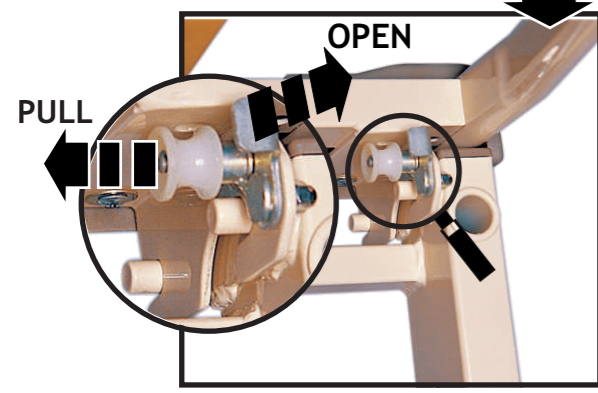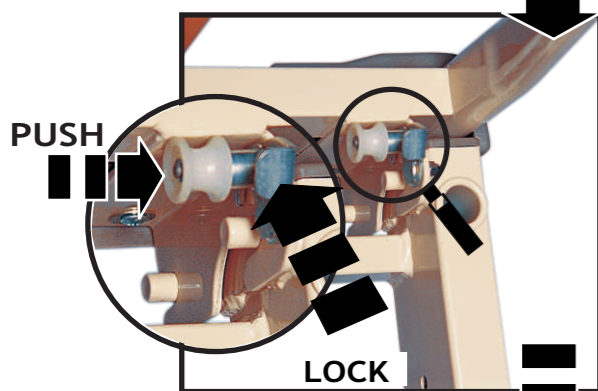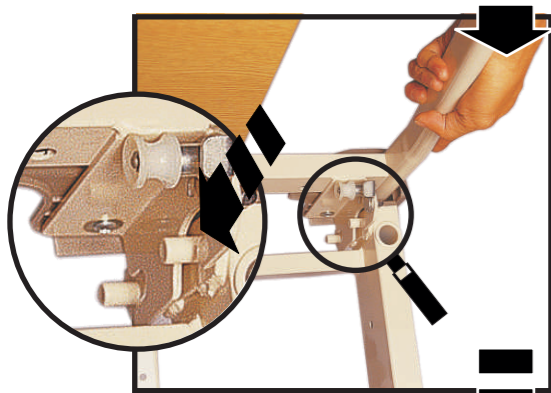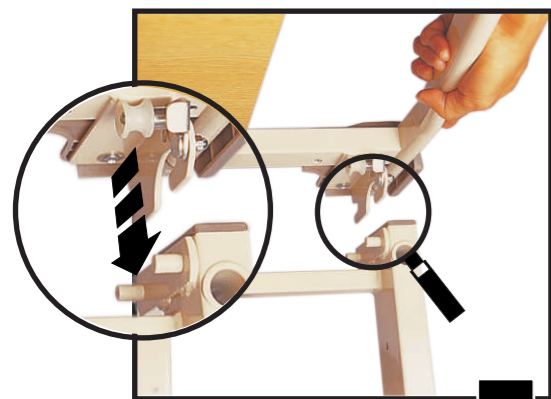

Pemasangan Folding Side Rail

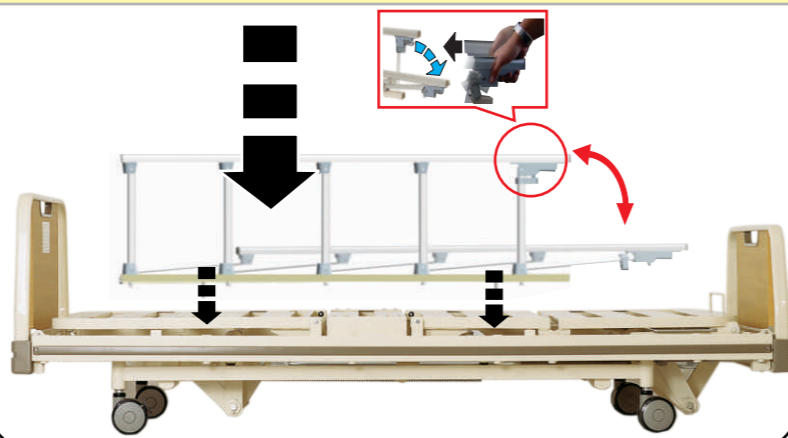


Sistem Crank

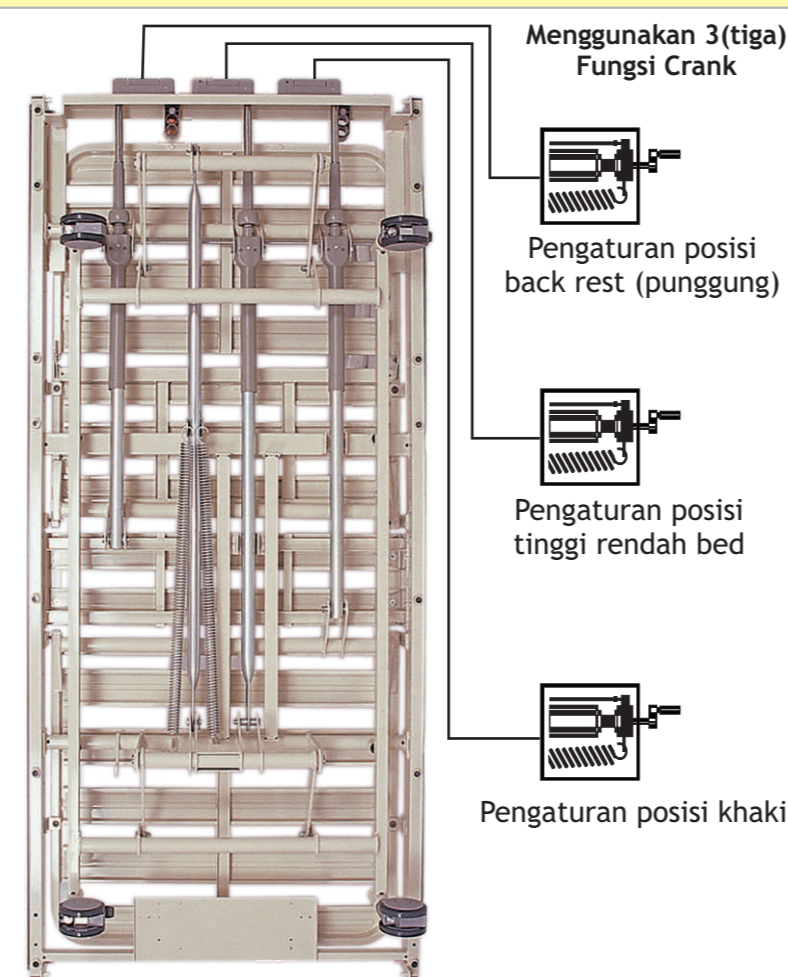

Manufactured by :
PT. Chitose Internasional Tbk

Chitose[®]
INNOVATION BY YOUR INSPIRATION

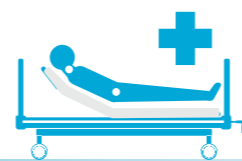

Nursing Bed

Health Therapy Product

Type **CB-7003D**


Praktis
Nyaman
Kuat
Aman
Bersih
&
Tenang



Chitose[®]
INNOVATION BY YOUR INSPIRATION



Ergonomis

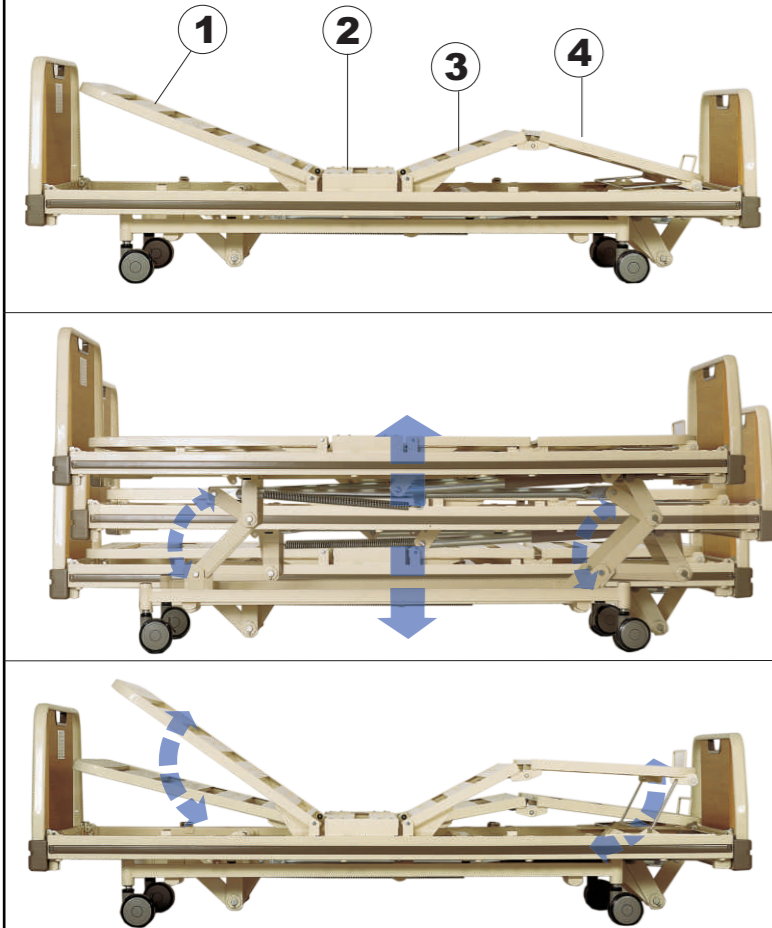

Bagian penyangga tubuh yang terdiri dari perpaduan empat panel baja yang kokoh, membantu bagian kepala, punggung, dan kaki pengguna berada pada posisi yang nyaman.

Double Lock




Independent Lock Caster System pada roda depan dan roda belakang untuk menjamin keamanan dan kestabilan saat bed berhenti.

Sistem Crank (Hi-Low)




Bentuk Crank yang menarik untuk mengatur posisi bed sesuai kebutuhan.

Desain Panel

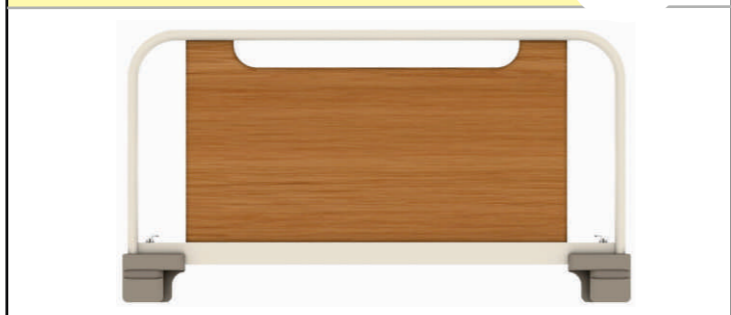


Desain sekat pada kaki (foot board) dan kepala (head board) menggunakan bahan kayu yang mencitrakan kesan simple, aman, bersih, sehat dan alami.

Dimensi

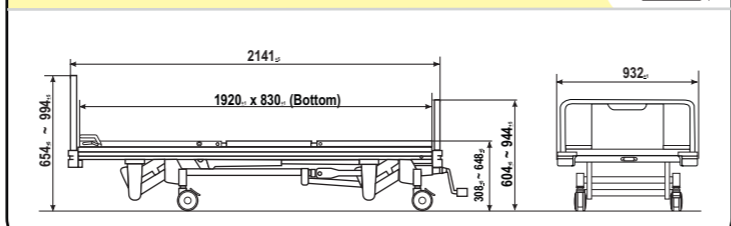

Sistem Pengoperasian Crank

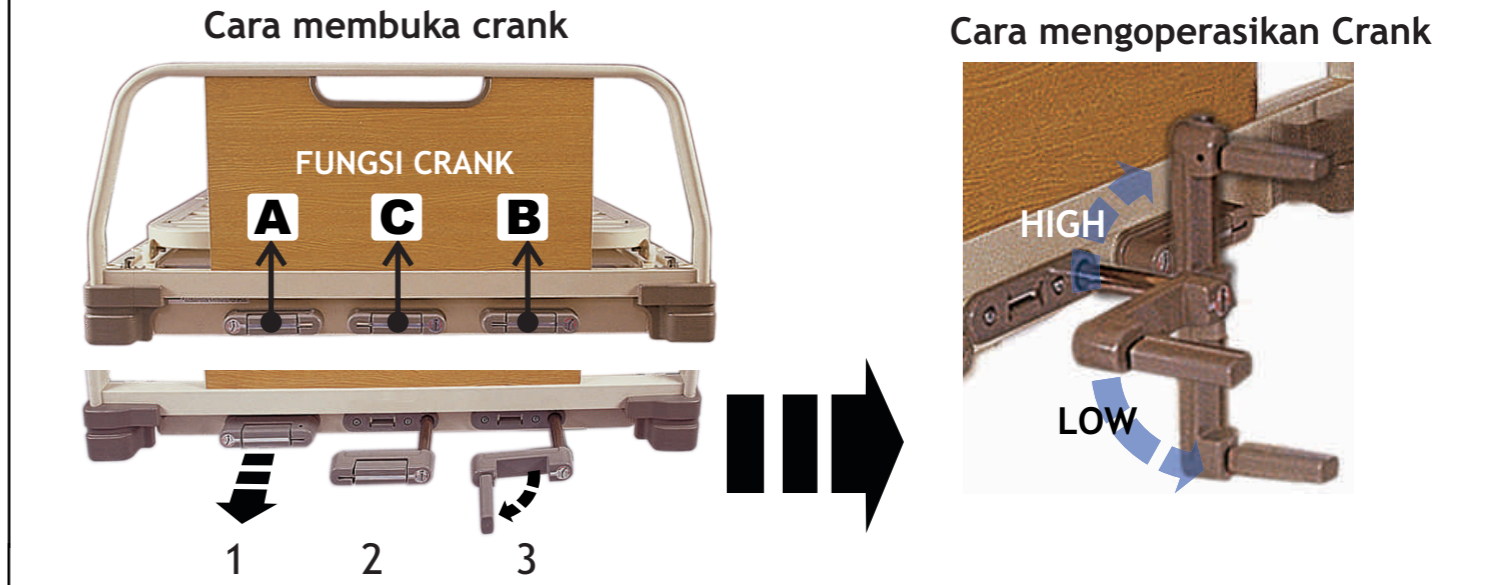

A Pengaturan posisi back rest menggunakan sistem Crank

B Pengaturan posisi foot rest menggunakan sistem Crank



Pengaturan Posisi Tinggi Bed

