

PENANDAAN CB 7012 D



PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System	Adjustable Hi-Lo by crank, adjustable back raise with cylinder gas control (CB-7012 DST, CB-7011 DST)
Accessories	Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR-003) & Folding Side Rail (FSR-001)
Lock System	Double Lock System
Weight (kg)	Approx. 90
Frame Finishing	Powder Coating
Frame Color	Ivory
Frame Material	Steel
Dimension W x D x H (mm)	Bed (W 1012, L 2141, H 654-994), H/F Board (W 1012)


Ukuran Produk

Ukuran
W x L x H : 1012 x 2141 x 654-994

Berat Produk

Berat Kosong : ± 90KG
Berat Beban Maksimum : ± 400KG (Statis) & ±170 KG (Dinamis)
Ukuran Paking : 2050 x 1070 mm x 190

PRODUCT DIMENSION

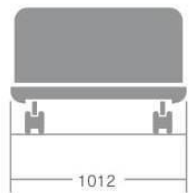

Chitose®

MANUFACTURE LABEL



KEMENKES RI AKD: AKD 10902910315

IZIN EDAR KEMENKES

Lot No : 24050600000

Type : **CB 7012 D**

PT. Chitose Internasional Tbk
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
Distributor Center Jln. H.M.S.
Mintaredja Baros Cimahi 40521,
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

= 245 Kg

= 175 Kg

Manufactured by Chitose


MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

SNI

SNI IEC 60601-2-52-2014
LSPr-022-IDN

SNI LABEL

Warning Label and Sign

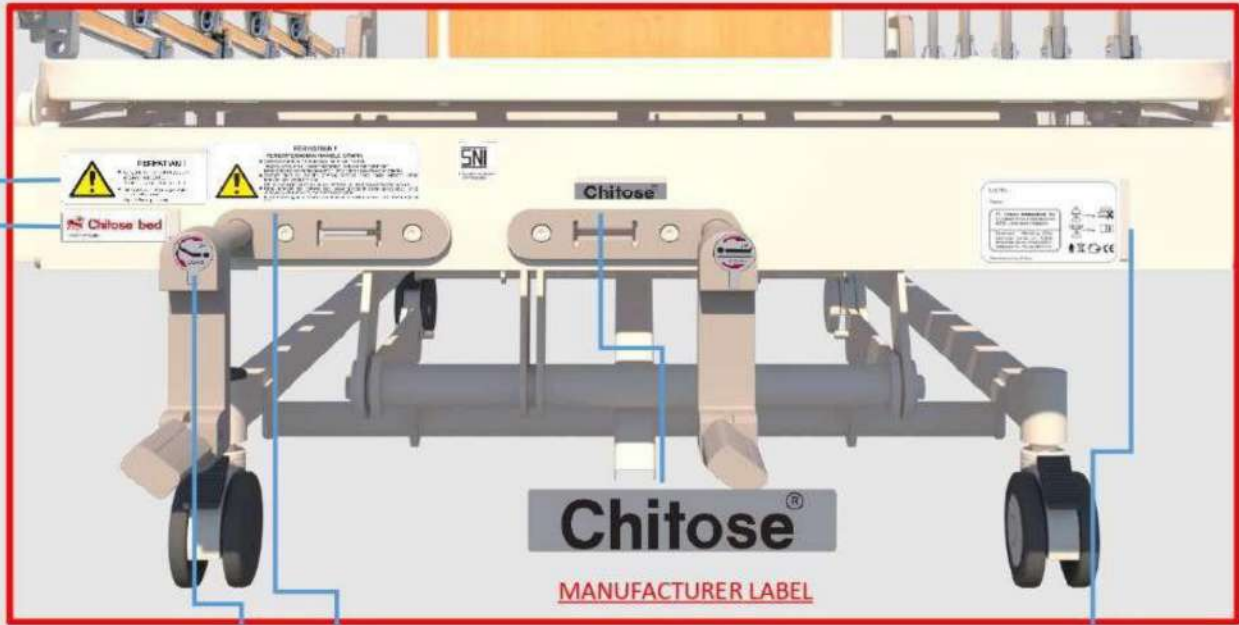

CRANK LABEL

PERHATIAN !
PENGOPERASIAN HANDLE CRANK

- Sebelum memutar handle crank, harap perhatikan Tangan, Anak-anak, Hewan peliharaan, alat-alat dan bahan lain. Before turning the crank handle please watch: hands, children, pets, other people or materials.
- Setelah memutar Handle, pasang kembali pada posisi terkunci untuk menghindari jatuh tiba-tiba. After turning the crank handle, put it back on lock position in order to avoid sudden falling down.
- Untuk menghindari terkena kaki, pasang Handle Crank pada posisi awal (terkunci). Jika terkem, maka Bed akan jatuh. In order to avoiding hit, put the crank handle back on first position (locked). If it is not, the bed will hit down.

Caution Handle operation

Chitose bed

KEMENKES RI AKD: _____

IZIN EDAR KEMENKES

PERHATIAN !

- Jangan menempatkan tangan dibawah tempat tidur. Do not place your hand under the bed.
- Tempat tidur hanya digunakan untuk satu orang. Capacity for one person only.

CAUTION LABEL

Lot No : _____

Type : _____

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mintaredja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

245 Kg

175 Kg

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

- 1 Lot Number and Product Type
- 2 Manufacture Information
- 3 Safe Workload Sign and Maksimum Weight Sign
- 4 Use Appropriate mattress Sign
See Manual Instruction Sign
- 5 Applied Part Sign
Do not Dispose as Household Waste Sign
Indoor Using Only Sign

CHITOSE Hospital Bed
Warning Label and Sign



SAFETY NOTICE
 PERINGATAN KESELAMATAN

- Jangan menggunakan tempat tidur ketika dalam kondisi rusak.
Do not use the bed if it appears damaged.
- Pada saat memutar pegangan engkol, harap perhatikan bagian tangan, kaki atau anggota tubuh dari pasien tidak berada dibawah tempat tidur dan di tengah-tengah rel samping.
When turning the crank handle please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the rail.
- Ketika memutar pegangan engkol ke atas dan ke bawah, hanya memperbolehkan satu pasien berada di atas tempat tidur.
When turning the crank handle up or down, only one patient allow to be on the bed.
- Ketika pasien tertidur, rel samping harus dalam keadaan terpasang berdiri untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur.
When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- Setelah memutar pegangan engkol, pegangan engkol harus ditempatkan pada posisi semula (terkunci) dan melipat ke dalam.
After turning up/down the crank handle must be put back on locked position and fold inside.
- Pegangan engkol harus selalu pada posisi terkunci dan melipat ke dalam untuk menghindari benturan dengan kaki.
Crank handle must be always in locked position and folded inside to avoid injury of the leg.

PT. Chitose Internasional Tbk.
 Telp. (022) 8021989 - Fax (022) 8021888

DILARANG MELEPAS LABEL INI

SAFETY NOTICE



SAFETY LABEL